

Contour® next link 2.4

Mätsystem för blodsocker
med trådlös överföring



Medtronic



Använder endast CONTOUR®NEXT blodsockerteststickor

BRUKSANVISNING

AVSEDD ANVÄNDNING

CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker med trådlös överföring (mätare, teststickor och kontrollösning) är avsett för självtestning av personer med diabetes för att övervaka blodsockerkoncentrationer för kvantitativ mätning av glukos i färskt kapillärt helblod taget från fingerspetsen eller handflatan. **Det är endast avsett för *in vitro*-diagnostik.** Den kliniska nyttan av denna enhet är att den kan användas som ett hjälpmedel att övervaka effekten av ett behandlingsprogram för diabetes.

CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker med trådlös överföring är avsett att överföra blodsockervärden och skicka en fjärrbolus till Medtronic-enheter och underlätta överföring av information till CareLink® programvara genom användning av radiofrekvens-kommunikation.

CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker med trådlös överföring är inte avsett för diagnos av, eller screening efter diabetes mellitus, och ska inte användas inom neonatalvård.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



VIKTIGT

Allvarlig sjukdom

- Kapillära blodsockermätningar (med stick i fingret eller på alternativt ställe) är eventuellt inte kliniskt lämpligt när det perifera flödet är nedsatt. Chock, svår hypotoni, hyperosmolär hyperglykemi, diabetesketoacidosis och svår uttorkning är exempel på kliniska tillstånd som kan påverka blodsockermätningen av perifert blod negativt.¹⁻³
- Förvaras utom räckhåll för barn. Denna sats innehåller smådelar som kan orsaka kvävning om de sväljs av misstag.

Kontakta sjukvårdspersonal

- Innan du ställer in några målintervall eller Hög eller Låg varning på din mätare.
- Innan du ändrar din medicinerings baserat på testresultaten.
- Om ditt blodsockervärde är under 2,8 mmol/L, följ omedelbart råd från sjukvården.
- Om ditt blodsockervärde är över 13,9 mmol/L, tvätta händerna noga och gör om testet med en ny teststicka. Kontakta sjukvårdspersonal snarast möjligt om du får ett liknande resultat.
- Om huruvida testning på alternativa stickställ (AST) är lämpligt för dig.

Möjlig smittrisk

- Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten före och efter testning, eller vid hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor.
- Blodprovstagaren och lansetterna är endast avsedda att användas av en och samma person. Dela dem inte med någon, inklusive andra familjemedlemmar. Använd inte på flera personer.^{4,5}
- Alla delar av denna enhet betraktas som biologiskt riskmaterial och kan potentiellt sprida smittsamma sjukdomar, även efter rengöring. För rengöringsanvisningar, se Rengöring av mätaren, sidan 62.
- Blodprovstagaren som medföljer ditt startpaket är avsedd för självtestning av en enskild patient. Den får inte användas på mer än en person på grund av infektionsrisken.
-  Använd en ny lansett varje gång du testar, eftersom de inte längre är sterila efter användning.

- Kassera alltid teststickor och lansetter som medicinskt avfall eller enligt anvisning från sjukvårdspersonal. Alla produkter som kommer i kontakt med mänskligt blod ska behandlas som möjliga spridare av smittsamma sjukdomar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-  Läs bruksanvisningen för CONTOUR®NEXT LINK 2.4, bipacksedeln till blodprovstagaren, din bruksanvisning till Medtronic-enheter och allt instruktionsmaterial som medföljer din mätarens startpaket innan du påbörjar testning. Följ alla bruksanvisningar och skötselinstruktioner exakt som de beskrivs för att undvika felaktiga resultat.
 - Kontrollera att produkten inte har några delar som saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti en ny kartong, ska teststickorna inte användas. För hjälp kontakta kundsupport. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.
 - CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätaren fungerar endast med CONTOUR®NEXT teststickor och CONTOUR®NEXT kontrollösningar.
 - Förvara alltid CONTOUR NEXT teststickorna i sin originalburk. Stäng burken omedelbart efter att du tagit ur en teststicka. Burken är gjord för att hålla teststickorna torra. Undvik att utsätta mätaren och teststickorna för överdriven fuktighet, värme, kyla, damm eller smuts. Om teststickorna utsätts för luftfuktighet genom att burken lämnas öppen eller om teststickorna inte förvaras i originalburken kan de skadas. Detta kan leda till felaktiga testresultat. Använd inte en teststicka som verkar vara skadad eller använd.
 - Kontrollera utgångsdatumet på teststickorna och kontrollösningen. Använd inte teststickorna eller kontrollösningen om utgångsdatumet på burkens etikett och kartongen har passerats. Detta kan orsaka felaktiga resultat. Använd inte kontrollösningen om det gått 6 månader eller mer sedan du först öppnade flaskan. Efter att flaskan har öppnats för första gången, skriv upp kasseringsdatumet om 6 månader på kontrollösningens etikett.
 - Kontakta kundsupport om resultatet på kontrollösningen ligger utanför intervallet. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget. Använd inte mätaren förrän du åtgärdat problemet.
 - Mätaren är gjord för att ge korrekta resultat vid temperaturer på mellan 5°C och 45°C. Om du befinner dig utanför detta temperaturområde ska du inte utföra tester. När mätaren flyttas från ett ställe till ett annat, ska du låta mätaren anpassa sig till temperaturen på det nya stället i ungefär 20 minuter innan du utför ett blodsockertest.
 - Testa inte blodsockret när CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätaren är ansluten till en dator.
 - Använd endast godkända kablar och väggsladdare från tillverkaren eller en CE-märkt 5 voltsladdare.
 - CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren är förinställd och låst på att visa resultaten i mmol/L (millimol glukos per liter blod).
 - ✦ Resultat i mmol/L visas **alltid** med decimal.
 - ✦ Resultat i mg/dL visas **aldrig** med decimal.
- Exempel:** 5,2^{mmol/L} eller 93^{mg/dL}
- ✦ Kontrollera på din skärm att resultaten visas på rätt sätt. Om inte, se kontaktuppgifter till kundsupport på det bakre omslaget av denna bruksanvisning.
 - CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker med trådlös överföring har ett mätintervall på 1,1 mmol/L till 33,3 mmol/L.
 - ✦ För resultat under 1,1 mmol/L eller över 33,3 mmol/L:
 - Om ditt blodsockervärde är under 1,1 mmol/L, visas skärmen **"Följ omedelbart råd från sjukvården"**, och mätaren piper två gånger. Kontakta sjukvårdspersonal.
 - Om ditt blodsockervärde är över 33,3 mmol/L uppmanas du på nästa skärm att utföra ett nytt test. Mätaren piper två gånger. Om resultaten fortfarande är över 33,3 mmol/L, kommer **"Följ omedelbart råd från sjukvården"** att visas. iii

- Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-nav med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. En förlängningssladd för USB finns tillgänglig. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använder du USB-förlängningskabeln för att skydda mätaren från värmeexponering från datorn.

OBSERVERA: Din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare fungerar bara tillsammans med CONTOUR®NEXT teststickor och CONTOUR®NEXT kontrollösningar.

Uppladdningsbart batteri

Din CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätare har ett uppladdningsbart batteri. Du måste ladda batteriet innan du kan använda mätaren och du kan inte göra ett blodsockertest medan batteriet laddas.

Ladda mätaren med hjälp av en väggladdare eller en dator



- Ta bort USB-locket.
 - Sätt in mätarens USB-kontakt i väggladdaren* eller använd USB-förlängningskabeln.
- Mätaren är fulladdad när lampan vid stickporten slutar blinka och slocknar.

* Väggladdare är eventuellt inte inkluderad i alla startpaket. Kontakta kundsupport för information om hur du erhåller en väggladdare.

OBSERVERA: Du ska inte utföra något blodsockertest när mätaren är ansluten till en extern enhet, t.ex. en dator.

OBSERVERA: Mätaren går att snabbadda. Efter en minuts laddning kan du koppla loss mätaren och göra ett blodsockertest om det behövs.

En USB-förlängningskabel medföljer för din bekvämlighet.



- ELLER**
- Ta bort USB-locket.
 - Sätt in mätarens USB-kontakt i datorn eller använd USB-förlängningskabeln.
 - Se till att datorn är igång och att den inte befinner sig i standby-, vilo- eller energisparläge.

OBSERVERA: Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-nav med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använd USB-förlängningskabeln för att skydda mätaren från att utsättas för den värme som alstras av datorn.

Innehållsförteckning

CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker med trådlös överföring.....	3
Din CONTOUR®NEXT teststicka.....	3
Grundinställningar.....	5

Förbereda blodprovstagaren	13
Få fram en bloddroppe – testning på fingertoppen	15
Testresultat.....	16
Test på alternativt testställe (AST) – handflata.....	18
Test med kontrollösning.....	23

AutoLog (markera dina resultat).....	25
Skicka resultat till pumpen.....	25
Skicka en bolusdos till pumpen.....	25
Påminnelsefunktion	28
Noteringar	30

Bolus	31	Ljud.....	47
Loggbok	31	AutoLog	47
Trender (Medelvärden och Sammanfattningar)	32	Målintervall för blodsocker	49
Inställningar	33	Trendintervall.....	51
Alternativ för pump	33	Hög och Låg varning	51
Mätarens Inställningar för skicka	37	Ställa in språk	52
Påminnelsefunktion	43	Kundsupport	52
Datum och tid	45		

Överföring av data till CareLink® Personal programvara	53
Felmeddelanden	53
Batteriets status.....	54
Teknisk information.....	56
Skötsel av mätaren	62
Rengöring av mätaren	62
Garanti	64
INDEX.....	66

Att komma igång

CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker med trådlös överföring

Din CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker med trådlös överföring fungerar tillsammans med CONTOUR®NEXT teststickor.



VIKTIGT

Förvaras utom räckhåll för barn. Oavsiktlig förtäring kan orsaka kvävning.

Din CONTOUR NEXT teststicka

Grå fyrkantig ände

För in den här änden i stickporten med den grå delen vänd uppåt.

Blodprovöppning

Blodprovet sugas in här.



OBSERVERA: CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätaren fungerar endast med CONTOUR NEXT teststickor och CONTOUR®NEXT kontrollösningar.

"Pratar" med din MiniMed® 640G insulinpump



Din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare kan automatiskt skicka dina blodsockerresultat eller en bolus direkt till din MiniMed insulinpump, om din mätare och pump är hopkopplade. Detta gör att du inte behöver ange bolusdos eller blodsockerresultat i insulinpumpen manuellt. Upp till 3 CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare kan anslutas till din MiniMed insulinpump. För att använda mätarens sändfunktion måste din CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare och MiniMed insulinpump vara inom 1,8 meter från varandra. Om du inte använder mätarens sändfunktion kan du ändra Inställningar för Skicka till Aldrig på din CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare för att spara batteriet.

Översikt över mätaren

Sätta på/stänga av mätaren

- Håll den övre **Meny**-knappen nedtryckt för att sätta på/stänga av mätaren.
- Sätt in en teststicka för att sätta på mätaren.
- Mätaren stängs av efter 3 minuters inaktivitet.


Använda övre Meny-knappen



Den övre **Meny**-knappen har tre funktioner:

- Håll den övre **Meny**-knappen nedtryckt **för att sätta på/stänga av mätaren**.
- Från de flesta skärmar, tryck en gång på den övre **Meny**-knappen för **att gå tillbaka en skärm**.
- För att sätta på/stänga av lampan vid stickporten**, tryck snabbt på den övre **Meny**-knappen två gånger.

Använda knapparna för att välja/bläddra

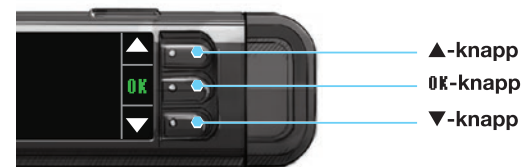

- Använd de tre knapparna bredvid skärmen för att göra dina val genom att trycka på knappen vid ditt val.
- Bläddra uppåt eller nedåt för fler alternativ när ▲ eller ▼-pilarna visas på mätarens skärm.
- När ditt val har markerats, bekräfta genom att trycka på knappen **OK**.

OBSERVERA: Tryck på och håll knappen ▲ eller ▼ intryckt för att bläddra genom listan snabbare.

Använda Huvudmenyn



Det finns fyra alternativ i huvudmenyn: Bolus, Loggbok, Trender och Inställningar. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att bläddra till önskat val. Tryck på **OK** när ditt val är markerat.

OBSERVERA: Koppla bort mätaren från laddningskällan innan du gör inställningar.

Grundinställningar



1. Ladda mätaren helt innan du använder den. Se sidan iv.

Sätt på



2. Tryck ner och håll den övre **Meny**-knappen nedtryckt tills mätaren slås på. Efter en välkomstskärm ser du skärmen för val av **Språk**.


Ställa in Språk

Dessa mätarskärbilder är endast för illustrativa syften.



3. Tryck på knappen ▼ för att se fler språkalternativ. När ditt språk är markerat trycker du på **OK**.

Detta skärmexempel visar språkvalen. Ordningen på språken kan variera mellan olika länder.

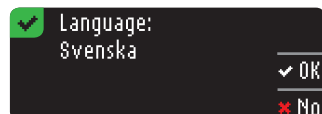

4. Tryck på **OK** för att bekräfta.
Om rätt språk inte visas trycker du på **No**.


Ansluta till pump




5. Tryck på **OK** för att ansluta till en MiniMed insulinpump nu.

Om du trycker på **Ignorera** blir du ombedd att acceptera eller ändra datum och tid.

För att ändra följer du instruktionerna som börjar på sidan 45, steg 5. Återgå till Grundinställning, sidan 10, steg 21 när du är klar.

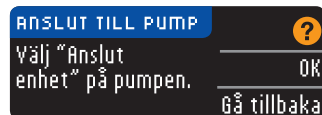

6. Tryck på **OK**.

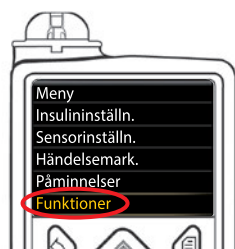

7. Lägg ned mätaren och ta upp din MiniMed insulinpump.


Tryck på valfri knapp för att slå på skärmen.

Tryck på knappen **Meny** .

Använd nedpil  för att bläddra till **Funktioner**.


Tryck på knappen Välj .

OBSERVERA: Om pumpskrämen stängs av, tryck på valfri knapp för att slå på den igen.

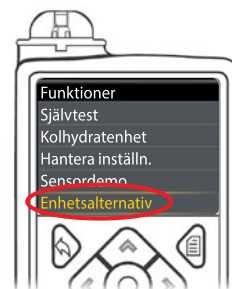


8. Använd nedpil  i menyn Funktioner för att bläddra till **Enhetsalternativ**.

Tryck på knappen Välj .

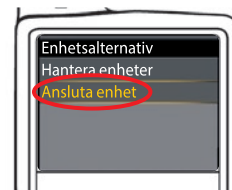


9. Bläddra till **Anslut enhet** i menyn Enhetsalternativ.

Tryck på knappen Välj .

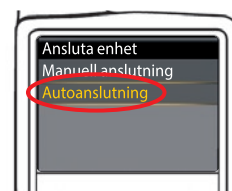

10. Placera mätaren och pumpen bredvid varandra.

Välj **Autoanslutning** på pumpen.

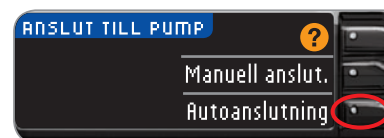

Välj **Autoanslutning** på mätaren.



Om du väljer **Manuell anslutning**, se sidan 38.

OBSERVERA: Om du tappar bort mätaren eller den blir stulen, radera mätaren från din pump. Se bruksanvisningen för MiniMeds insulinpump.

När pumpen ansluts till mätaren ändras SN på **mätarens** skärm till ett annat serienummer. Detta nummer är **pumpens** SN.




14. Vänd på pumpen. Kontrollera att SN på baksidan av **pumpen** motsvarar **pumpens** serienummer, som nu visas på **mätarens** skärm.

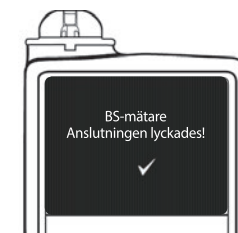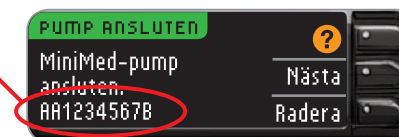

15. Bekräftelseskärmen visas som hastigast på pumpen.



Skärmen Hantera enheter visas på pumpen.

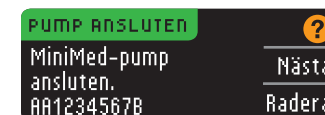


Tryck sedan på **Nästa** på din mätare.



Håll knappen Tillbaka på pumpen intryckt tills du ser hemmaskärmen.


16. Lägg ned pumpen och ta upp mätaren.

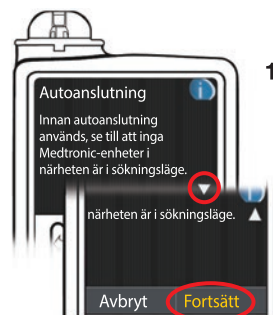


11. Läs på pumpskärmen. Se till att inga andra Medtronic-enheter i närheten är i sökläge. Använd nedpil för att bläddra till nästa sida. Använd pilknapparna för att bläddra till **Fortsätt**. Tryck på knappen Välj .



12. Välj **Sök** på pumpen.

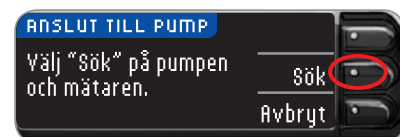


Välj **sök** på mätaren.

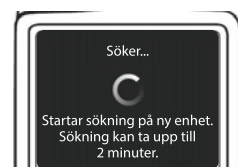

Sökningen kan ta upp till 2 minuter.



13. Kontrollera att enhetens SN (serienummer) på **pumpens** skärm motsvarar **mätarens** SN på **mätarskrmen**. Om de stämmer överens, **Bekräfta** på pumpen. Tryck på knappen Välj .

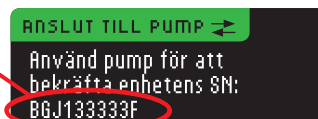


Mätarens Inställningar för skicka

17. När mätaren och pumpen har kopplats samman ska du ställa in dina **Inställningar för skicka**. Det här styr hur mätaren skickar blodsockerresultat till din MiniMed insulinpump.


Alternativen är:

Alltid	Mätaren skickar alltid resultaten
Fråga mig	Mätaren frågar dig innan den skickar resultaten
Aldrig	Mätaren skickar aldrig resultaten

Välj den **Inställning för skicka** som passar dig bäst.

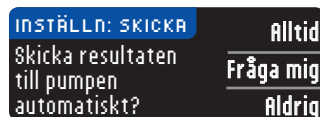

Ditt val kan ändras senare i Inställningar (se sidan 42).

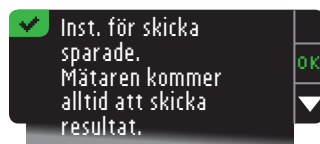

18. Tryck på **OK**.


Format för datum och tid

I detta steg väljer du hur datum och tid ska visas på din mätare. Om du inte är ansluten till någon pump (dvs. om du tryckte på **Ignorera** i steg 5 vid grundinställningen), blir du ombedd att acceptera eller ändra det visade datumet, följt av tiden.

OBSERVERA: Din pump styr automatiskt datumet och tiden. Om dessa behöver ändras på din pump, se din bruksanvisning för MiniMeds insulinpump. Det datumformat du väljer på mätaren gäller bara för mätaren.



19. Skärmen för **Datumformat** kommer upp på din mätare. Välj ditt datumformat.

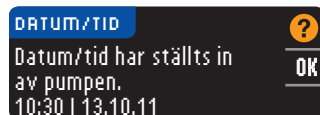

20. Tryck på **OK**.

AutoLog

Med AutoLog-funktionen kan du markera dina testresultat som



När du får mätaren är den förinställd på **AutoLog AV**.



21. När AutoLog-skärmen visas, välj **Acceptera** för att låta AutoLog vara kvar på AV. Eller tryck på **Sätt På** för att aktivera AutoLog.

Hög och Låg varning

Hög/låg-varning meddelar dig när ditt testresultat är över eller under dina valda inställningar. Resultat över Hög markeras med Høgt blodsocker. Resultat under Låg markeras med Lågt blodsocker. Varningarna visas som stora, orange siffror.




VIKTIGT

Rådgör med sjukvårdspersonal innan du ställer in någon Hög eller Låg varning på din mätare.


Din mätare är förinställd med en hög varningsnivå på 13,9 mmol/L och en låg varningsnivå på 3,9 mmol/L. Du kan **Acceptera** eller **Ändra** dessa nivåer.

OBSERVERA: Varningar kan bara ställas in utanför ditt/dina valda målintervall. För ytterligare information, kontakta kundsupport. Kontaktuppgifter till kundsupport finns på det bakre omslaget.

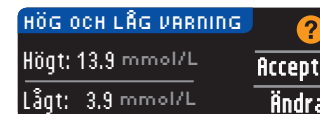


22. Välj **Acceptera** för att behålla de förinställda varningsnivåerna. Välj **Ändra** för att ändra varningsnivåerna.

OBSERVERA: Dina målintervall måste ligga inom dina varningsnivåer för Hög och Låg. I nästa steg kommer du att ställa in målintervallen.

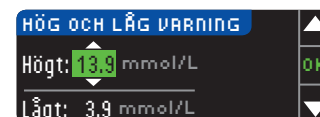


23. Om du valde **Ändra** trycker du på knappen **▲** eller **▼** för att ställa in varningsnivå för Hög. Denna kan ställas in mellan 7,0 – 20,0 mmol/L. Tryck på **OK**.

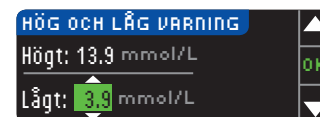

24. Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att ställa in varningsnivå för Låg. Denna kan ställas in på 3,0 – 5,5 mmol/L. Tryck på **OK**.

OBSERVERA: Tryck på och håll knappen **▲** eller **▼** nedtryckt för att bläddra genom listan snabbare.

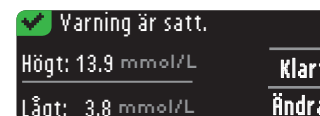

25. På nästa skärm bekräftas dina val. Tryck på **Klart** för att bekräfta dina varningsinställningar.

Målintervall

Därefter blir du ombedd att acceptera dina mål för blodsocker. Målintervall (målvärde) är dina personliga områden för blodsockerresultat. När AutoLog är AV har du bara ett målintervall. När AutoLog är PÅ har du målintervall för Fastar, Före måltid och Efter måltid.

OBSERVERA: Mål kan bara ställas in inom din/dina valda varningsnivå(er). För ytterligare information, kontakta kundsupport. Kontaktuppgifter till kundsupport finns på det bakre omslaget.



VIKTIGT

Rådgör med sjukvårdspersonal innan du ställer in några målintervall på din mätare.




26. När AutoLog är AV kan du **Acceptera** eller **Ändra** förinställt målintervall för blodsocker. Det förinställda intervallet är 3,9 - 10,0 mmol/L.




Om AutoLog är PÅ kan du **Acceptera** eller **Ändra** det förinställda målintervall för blodsocker för Fastar, Före måltid och Efter måltid. För varje mål finns alternativet att **Acceptera** eller **Ändra**.

De förinställda värdena baserade på ADA-rekommendationerna är:⁶

	Fastar	3,9 - 7,2 mmol/L
	Före måltid	3,9 - 7,2 mmol/L
	Efter måltid	3,9 - 10,0 mmol/L

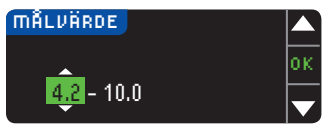

27. Om du vill ändra Målintervallen trycker du på knappen **▲** eller **▼** tills du når det önskade målet, och trycker sedan på **OK**. Tryck på **Acceptera** för att bekräfta.
Du kan också ändra dessa inställningar senare genom att gå till Huvudmenyn och välja Inställningar. Se sidan 49.

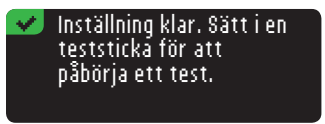

Grundinställningen är klar. Du kan nu mäta ditt blodsocker. Se Testa på nästa sida.

Testa

Förberedelse för test

Läs bruksanvisningen för CONTOUR NEXT LINK 2.4, din bruksanvisning för MiniMed insulinpump, bipacksedeln till blodprovstagaren och allt instruktionsmaterial som medföljer din mätare startpaket innan du påbörjar testning. Följ alla bruksanvisningar och skötselinstruktioner exakt som de beskrivs.

Kontrollera att produkten inte har några delar som saknas, är skadade eller trasiga. Om burken med teststickor är öppen inuti en ny kartong, ska teststickorna inte användas. Kontakta kundsupport för hjälp med ersättningsdelar. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.

OBSERVERA: Din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare fungerar bara tillsammans med CONTOUR®NEXT teststickor och CONTOUR®NEXT kontrollösningar.

Ha allt material du behöver redo innan du påbörjar testningen. Detta innefattar din CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätare, CONTOUR NEXT teststickor, blodprovstagare samt lansetter tillhandahållna med ditt startpaket. Du behöver eventuellt också CONTOUR NEXT kontrollösning för att göra en kvalitetskontroll. CONTOUR NEXT kontrollösningar finns tillgängliga separat om de inte är inkluderade i mätarens startpaket.

- Du ska inte utföra något blodsockertest när mätaren är ansluten till en extern enhet, t.ex. en dator.
- Använd endast godkända sladdar eller väggsladdare från tillverkaren, eller en 5V-laddare som är CE-märkt.

Förbereda blodprovstagaren

Bilder på blodprovstagaren visas endast som illustration. Din blodprovstagare kan se annorlunda ut. Se bipacksedeln för blodprovstagaren för detaljerade instruktioner om förberedelse av blodprovstagaren.



VIKTIGT: Möjlig smittrisk


- Blodprovstagaren som medföljer ditt startpaket är avsedd för självtestning av en enskild patient. Den får inte användas på mer än en person på grund av infektionsrisken.




VIKTIGT

- Kassera den använda lansetten som medicinskt avfall eller enligt rekommendationer från sjukvårdspersonal.
- Återanvänd inte lansetterna. Använd en ny lansett varje gång du testar.

Läs bipacksedeln till blodprovstagaren för fullständiga instruktioner. Om du använder en annan blodprovstagare, se tillverkarens bruksanvisning. För instruktioner om testning på alternativt testställe, se sidan 18.

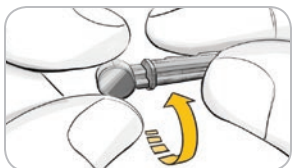


1. Ta bort munstycket från blodprovstagaren.
2. Lossa den runda skyddshatten på en lansett genom att vrida den ett ¼ varv, men ta inte bort den.

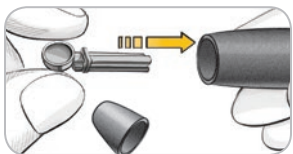


3. För in lansetten ordentligt i blodprovstagaren tills det tar stopp.



4. Vrid av den runda skyddshatten på lansetten. Spara den inför kasseringen av den använda lansetten.

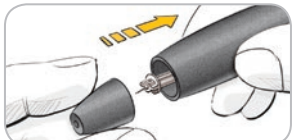

5. Sätt tillbaka munstycket.

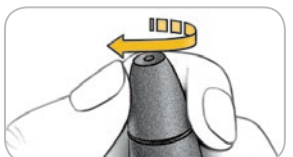

6. Vrid det justerbara munstycket för att justera stickdjupet. Det tryck som appliceras på stickstället påverkar också stickdjupet.

Förbereda teststickan



VIKTIGT

Tvätta alltid händerna med tvål och vatten och torka dem noga före och efter mätning, samt vid hantering av mätaren, blodprovstagaren eller teststickor.



1. Ta ut en CONTOUR®NEXT teststicka ur burken. **Stäng burken omedelbart efter att du tagit ut teststickan.**



2. Håll teststickan med den grå änden uppåt.
3. Sätt in den grå fyrkantiga änden ordentligt i stickporten tills mätaren piper (om Ljud är inställt på PÅ).




Tillsätt Blod visas. Mätaren är nu redo för blodsockertestning.

OBSERVERA: Efter att teststickan har förts in; om du inte tillsätter blod inom en minut dämpas mätarens skärm och mätaren piper. Tryck på valfri knapp så lyser skärmen Tillsätt Blod starkt igen. Efter 3 minuters sammanhängande inaktivitet stängs mätaren av.

Få fram en bloddroppe – testning i fingertoppen



1. Tryck blodprovstagaren stadigt mot stickstället och tryck på utlösarknappen.

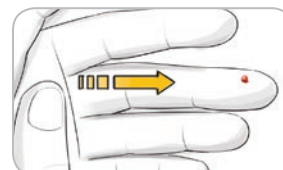

2. Stryk över handen och fingret mot stickstället för att få fram en bloddroppe. Kläm inte runt stickstället.



3. Testa omedelbart efter att en bra bloddroppe har bildats.



4. För omedelbart teststickans spets till bloddroppen. Blodet sugs upp i teststickan genom spetsen.


Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper.

Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet ovanpå teststickan, då detta kan orsaka felaktiga resultat eller andra fel.

Tillsätta mer blod



Om den första bloddroppen inte räcker piper mätaren två gånger och visar "FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA" och "TILLSÄTT MER BLOD NU". Du har cirka 30 sekunder på dig att tillsätta mer blod på samma teststicka.

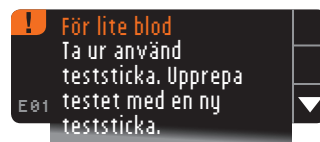

Om du inte tillsätter tillräckligt med blod inom cirka 30 sekunder instrueras du att ta bort stickan och upprepa med en ny sticka.

Testresultat

Testning med AutoLog Av



När du tillfört blod till teststickan med AutoLog avstängt, visas ditt resultat efter 5 sekunders nedräkning.



Om **Alltid** valdes i Inställningar för skicka under Inställning kommer resultaten automatiskt att skickas till din pump. Om **Aldrig** valdes i Inställningar för skicka, får du inte valet att skicka resultaten till din pump. Om **Fråga mig** valdes i Inställningar för skicka, kan du välja att skicka resultatet

till din pump efter varje blodsockertest. Tryck på **Skicka** eller **Skicka ej**. Om **Skicka** väljs, tryck på **OK** på skärmen som ber dig bekräfta att du vill sända.

Låt teststickan sitta kvar i mätaren för att skicka en bolusdos till pumpen (se sidan 25), ställa in en frivillig påminnelse om nästa test (se sidan 28) eller göra en notering (se sidan 30).



Om du är klar, ta ut teststickan ur mätaren. Håll den övre **Meny**-knappen nedtryckt för att stänga av mätaren. Mätaren stängs också av efter 3 minuters inaktivitet.

OBSERVERA: Kontrollera alltid displayen på din pump för att vara säker på att det visade blodsockerresultatet överensstämmer med det blodsockerresultat som visas på mätaren.

Testning med AutoLog På



Efter att du applicerat blod på teststickan, använd ▼ för att välja **Fastar**, **Före måltid**, **Efter måltid**, eller **Markera inte**, och tryck därefter på **OK**. (Bläddra nedåt för att se **Markera inte**.)

OBSERVERA:

- Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett AutoLog-val.
- Om ditt resultat är över eller under dina inställningar för **Hög** och **Låg** varning visas ditt resultat utan att du behöver trycka på någon knapp.

☐ Fastar	Använd Fastar-markeringen när du testar blodsockernivåer efter fastande (ingen mat eller dryck under 8 timmar, med undantag för vatten eller kalorifria drycker).
Före måltid	Före måltid-markeringen kan användas när du testar blodsockret inom en timme före en måltid.
Efter måltid	Efter måltid-markeringen kan användas när du testar blodsockret inom 2 timmar efter en måltid.
Markera inte	Du kan välja Markera inte om du testar vid andra tidpunkter än före eller efter en måltid eller vid fasta.

Om du gör ditt AutoLog-val snabbt, visas eventuellt återstoden av mätningens nedräkning.



Ditt testresultat visas i form av stora siffror och går sedan tillbaka till normal storlek på skärmen.



Om **Alltid** valdes i Inställningar för skicka under Inställning kommer resultaten automatiskt att skickas till din pump. Om **Aldrig** valdes i Inställningar för skicka, får du inte valet att skicka resultaten till din pump. Om **Fråga mig** valdes i Inställningar för skicka, kan du välja att skicka resultatet

till din pump efter varje blodsockertest. Tryck på **Skicka** eller **Skicka ej**. Om **Skicka** väljs, tryck på **OK** på skärmen som ber dig bekräfta att du vill sända.

Välj **Bolus** för att skicka en bolusdos till pumpen. Välj **Påminnelse** för att ställa in en påminnelse för ditt nästkommande test. Välj **Notering** för att lägga till mer information till resultatet.



Om du är klar, ta bort teststickan. Håll den övre **Meny**-knappen nedtryckt för att stänga av mätaren. Eller, efter 3 minuters inaktivitet stängs mätaren automatiskt av.

Test på alternativt testställe (AST) – handflata



VIKTIGT

- Fråga sjukvårdspersonal om test på ett alternativt stickställe är rätt för dig.
- Kalibrera inte ditt system för kontinuerlig glukosmätning utifrån ett AST-resultat.
- Beräkna inte bolus baserat på ett AST-resultat.

OBSERVERA: För testning på alternativt testställe, använd det genomskinliga munstycket på din blodprovstagare. Din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare kan användas för tester på fingertoppen eller i handflatan. Se bipacksedeln till blodprovstagaren för fullständiga instruktioner om testning på alternativt testställe.

VIKTIGT: Använd inte AST under följande omständigheter:

- Om du tror att du har lågt blodsocker
- När blodsockret ändras snabbt (efter en måltid, insulindos eller fysisk ansträngning)
- Om du inte kan känna av symtom på lågt blodsocker (är omedveten om hypoglykemerier)
- Om du får blodsockerresultat från det alternativa stället som inte stämmer med hur du mår
- När du är sjuk eller stressad
- Om du ska köra bil eller använda maskiner

Resultat från alternativa stickställen kan skilja sig från resultat från fingertoppen när blodsockernivåerna ändras snabbt (t.ex. efter en måltid, efter att ha tagit insulin eller under eller efter fysisk ansträngning). Dessutom kanske blodsockernivåerna inte stiger så högt eller sjunker så lågt som nivåerna i fingertoppen. Det är där möjligt att hypoglykemiska nivåer identifieras snabbare i fingertoppen än på alternativa stickställen.

Tester på ett alternativt stickställe rekommenderas endast när det har gått mer än två timmar sedan en måltid, diabetesmedicinering eller motion.

Om du inte har ett genomskinligt munstycke för att utföra AST, kontakta kundsupport. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.

Få fram en bloddroppe för test på alternativt stickställe



1. Tvätta händerna och stickstället med tvål och varmt vatten. Skölj och torka noga.
2. Sätt på det genomskinliga munstycket för AST på blodprovstagaren, som finns med i din mätarenhet. **Se bipacksedeln till blodprovstagaren för detaljerade instruktioner.**



3. Välj ett stickställe i den köttiga delen av handflatan. Undvik ådror, födelsemärken, ben och senor.



4. Tryck blodprovstagaren stadigt mot stickstället och tryck sedan på utlösarknappen.

Bilder på blodprovstagaren visas endast som illustration.



5. Håll kvar med ett fast tryck tills en liten, rund bloddroppe bildas.



6. Lyft enheten rakt upp och bort från huden utan att smeta ut blodet.

7. Testa genast när du har fått fram en liten, rund bloddroppe.

För omedelbart teststickans spets till bloddroppen. Blodet sugas upp i teststickan genom spetsen.

Testa inte blodprovet från handflatan om du har:

- Utsmetat blod
- Koagulerat blod
- Lättrinnande blod
- En genomskinlig vätska blandad med blod



8. Håll spetsen på teststickan i bloddroppen tills mätaren piper. Tryck inte spetsen mot huden och försök inte placera blodet ovanpå teststickan, då detta kan orsaka felaktiga resultat eller andra fel.



Om den första bloddroppen inte räcker, piper mätaren två gånger och visar skärmen "FÖR LITE BLOD PÅ TESTSTICKA" och "TILLSÄTT MER BLOD NU". Du har cirka 30 sekunder på dig att tillsätta mer blod på samma teststicka.



Om du inte tillför mer blod inom cirka 30 sekunder ska du ta bort stickan och upprepa med en ny sticka.



9. Om AutoLog-funktionen är påslagen så visas AutoLog-skärmen. Välj **Fastar**, **Före måltid**, **Efter måltid** eller **Markera inte** genom att trycka på **OK**-knappen när valet har markerats. Bläddra nedåt för att se **Markera inte**.

OBSERVERA:

- Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett AutoLog-val.
- Om ditt resultat är över eller under dina inställningar för Hög och Låg varning visas ditt resultat utan att du behöver trycka på någon knapp.



Om **Alltid** valdes i Inställningar för skicka under Inställning kommer resultaten automatiskt att skickas till din pump. Om **Aldrig** valdes i Inställningar för skicka, får du inte valet att skicka resultaten till din pump. Om **Fråga mig** valdes i Inställningar för skicka, kan du välja att skicka resultatet

till din pump efter varje blodsockertest. Tryck på **Skicka** eller **Skicka ej**. Om **Skicka** väljs, tryck på **OK** på skärmen som ber dig bekräfta att du vill sända. Du kan när som helst ändra dina Inställningar för skicka via menyn Inställningar (se sidan 42).



VIKTIGT

- Beräkna inte bolus baserat på ett AST-resultat.
- Kalibrera inte ditt system för kontinuerlig glukosmätning från en AST-mätning.

Om du är klar, ta ut teststicken ur mätaren. Håll den övre **Meny**-knappen nedtryckt för att stänga av mätaren. Mätaren stängs också av efter 3 minuters inaktivitet.

Utstötning och kassering av den använda lansetten



- Använd inte dina fingrar för att ta bort lansetten från blodprovstagaren. Din blodprovstagare har en automatisk lansettutstötningsfunktion.
- Se den separata bipacksedeln för blodprovstagaren tillhandahållen med ditt kit för instruktioner om automatisk utstötning av lansetten.



VIKTIGT

- Kassera den använda lansetten som medicinskt avfall eller enligt anvisningar från sjukvårdspersonal.
- Återanvänd inte lansetterna. Använd en ny lansett varje gång du testar.



VIKTIGT: Möjlig smittrisk

- Kassera alltid den använda teststicken och lansetten som medicinskt avfall eller enligt sjukvårdspersonalens anvisningar. Alla produkter som kommer i kontakt med mänskligt blod ska behandlas som möjliga spridare av smittsamma sjukdomar.
- Se bipacksedeln till din blodprovstagare för instruktioner om hur man korrekt avlägsnar och kasserar lansetten.

Testresultat – förväntade värden

Blodsockervärden varierar beroende på kost, medicindoser, hälsa, stress eller aktivitet. Glukoskoncentrationerna i plasma hos den som inte har diabetes håller sig normalt inom ett relativt smalt område, cirka 3,9 – 6,1 mmol/L vid fasta.⁷



VIKTIGT

Rådgör med sjukvårdspersonal om vilka värden du kan förvänta dig och sätt upp individuella mål.

- Om ditt blodsockervärde är under 2,8 mmol/L följ omedelbart råd från sjukvården.
- Om ditt blodsockervärde är över 13,9 mmol/L, tvätta och torka händerna noga och gör om testet med en ny teststicka. Följ omedelbart råd från sjukvården om du får ett liknande resultat.
- Tala alltid med din sjukvårdspersonal innan du ändrar medicineringen baserat på testresultaten.

Varningar vid högt och lågt blodsocker

Din mätare har en förinställning för lågt blodsocker (hypoglykemi) på 3,9 mmol/L och för högt blodsocker (hyperglykemi) på 13,9 mmol/L. Detta är de förinställda värdena, men de kan ändras av dig eller din sjukvårdspersonal. Du kan ändra varningsnivåerna för högt och lågt blodsocker under Huvudmeny, alternativet Inställningar (se sidan 51).

Om ditt blodsockerresultat är under din varningsnivå för lågt blodsocker:




- En skärm med stora siffror i orange varnar dig för att ditt blodsocker är lågt.

Om ditt blodsockerresultat är över din varningsnivå för högt blodsocker:



- En skärm med stora siffror i orange varnar dig för att ditt blodsocker är högt.

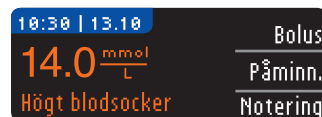

- Om AutoLog är på och du inte markerat ditt resultat innan varningen för högt eller lågt blodsocker visades, välj **Notering**.



- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att bläddra genom valmöjligheterna.
- Tryck **OK** när ditt val är markerat.

Testning i mörker

Mätaren har en belyst stickport för att hjälpa dig att testa i mörker.

- Tryck snabbt två gånger på **Meny**-knappen när mätaren är avstängd för att tända lampan vid stickporten.
- Sätt i en teststicka så visas displayen.
- Så snart blod har applicerats på teststickan slocknar lampan.
- Fortsätt med testet.
- Lampan släcks när du trycker snabbt två gånger på **Meny**-knappen.

Test med kontrollösning*



VIKTIGT

Skaka kontrollösningen ordentligt före testning.

OBSERVERA: Använd endast CONTOUR®NEXT kontrollösning (Normal, Låg eller Hög) med ditt CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker. Om något annat än CONTOUR NEXT kontrollösning används, kan resultaten bli felaktiga.

* Kontrollösning är eventuellt inte inkluderad i alla startpaket. Kontakta kundsupport för information om hur du erhåller kontrollösning. Kontaktuppgifter till kundsupport finns på bakre omslaget.

Kvalitetskontroll



- Skaka flaskan med kontrollösning ordentligt, cirka 15 gånger före varje användning.

- Oblandad kontrollösning kan ge felaktiga resultat.

Du bör göra ett kontrolltest när:

- du använder mätaren för första gången
- du öppnar en ny burk med teststickor
- du tror att mätaren inte fungerar ordentligt
- du får upprepade oväntade blodsockerresultat



VIKTIGT

- Kalibrera inte ditt enhet för kontinuerlig glukosmätning utifrån ett kontrollresultat.
- Beräkna inte ett bolus baserat på ett kontrollresultat.

OBSERVERA: Kontrollera utgångsdatum på burken med teststickor samt utgångs- och kasseringsdatum på flaskan med kontrollösning. ANVÄND INTE material som har passerat utgångsdatum.

Normal, hög och låg kontrollösning finns tillgängligt separat om det inte medföljer i startpaketet för mätaren. Du kan testa din CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätare med kontrollösning när temperaturen är 15°C–35°C. Använd alltid CONTOUR NEXT kontrollösningar. Andra fabrikat kan ge felaktiga resultat. Om du behöver hjälp med att få tag i CONTOUR NEXT kontrollösningar, kontakta kundsupport. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.




1. Ta ur en teststicka ur burken och sätt på locket igen ordentligt.



2. Håll teststickan med den grå änden uppåt.
3. Sätt in den grå fyrkantiga änden av teststickan ordentligt i stickporten tills mätaren piper.



4. Tillsätt blod visas. Mätaren är nu redo för blodsockertestning.

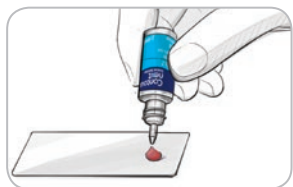

5. Skaka flaskan med kontrollösning ordentligt, cirka 15 gånger före varje användning.

6. Ta bort flasklocket och använd ett mjukt papper för att torka bort eventuell lösning runt flaskspetsen före dispensering av en droppe.

7. Krama ut en liten droppe kontrollösning på en ren, icke absorberande yta.

Applicera inte kontrollösning på fingertoppen eller på teststickan direkt från flaskan.



8. För omedelbart teststickans spets till droppen med kontrollösning.

9. Håll stickan i droppen tills mätaren piper.



10. Mätaren visar AutoLog-skärmen (om AutoLog är PÅ), men känner av kontrollösningen. Mätaren räknar ned i 5 sekunder och resultatet av kontrolltestet visas sedan på mätaren. Resultatet markeras automatiskt med "Kontrolltest" och lagras i minnet. Kontrolltestresultaten ingår inte i dina medelvärden för blodsocker.



11. Jämför ditt resultat av test med kontrollösning med intervallet som finns tryckt på teststickans flaska eller på undersidan av teststickans förpackning.

12. Ta bort teststickan. För att stänga av mätaren trycker du på och håller nere **Meny**-knappen ELLER också stängs mätaren av efter 3 minuter utan aktivitet. Kassera den använda teststickan som medicinskt avfall eller enligt anvisning från sjukvårdspersonal.

OBSERVERA: Kontrolltestresultat som markerats som "Kontrolltest" överförs inte till pumpen.



VIKTIGT

- Om resultatet för kontrollösningen är utanför intervallet kan resultatet komma att överföras till din pump när Inställningar för skicka är satt till "Alltid" (se sidan 25).
- Skicka inte kontrollresultat som ligger utanför intervallet till din pump.

VIKTIGT: Om det erhållna resultatet inte ligger inom intervallet listat på burken med teststickor eller kartongen, kanske det föreligger ett problem med teststickorna, mätaren eller din testningsteknik.

Om kontrollresultatet är utanför giltigt intervall, använd inte din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare för testning av blodsocker förrän du har löst problemet. Kontakta kundsupport. Se baksidestexten för kontaktinformation.

Funktioner

Din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare har många olika mätfunktioner.

AutoLog (markera dina resultat)

Din mätare levereras med en AutoLog-funktion, med vilken du kan markera ditt testresultat som Fastar, Före måltid, Efter måltid och Markera inte.

När du får mätaren är AutoLog AV. Om du vill se dina resultat för Fastar, Före måltid eller Efter måltid, rekommenderar vi att du sätter på denna funktion (se sidan 47).



Om du har slagit PÅ AutoLog under Inställningar visas AutoLog-skärmen före dina testresultat. Om ditt resultat ligger över din inställning för Hög varning eller under din inställning för Låg varning kommer resultatet emellertid alltid att visas efter 5 sekunder utan att du behöver trycka på någon knapp.

Skicka resultat till pumpen

Du kan skicka dina resultat till pumpen under testning. Då du gör grundinställningarna (Inställningar för skicka) eller under Inställningar (Alternativ för pump - Inställn: skicka) välj **Fråga mig** eller **Alltid**.



Om **Alltid** valdes i Inställningar för skicka under Inställning kommer resultaten automatiskt att skickas till din pump. Om **Aldrig** valdes i Inställningar för skicka, får du inte valet att skicka resultaten till din pump. Om **Fråga mig** valdes i Inställningar för skicka, kan du välja att skicka resultatet

till din pump efter varje blodsockertest. Tryck på **Skicka** eller **Skicka ej**. Du kan när som helst ändra dina Inställningar för skicka via menyn Inställningar (se sidan 42).

Du måste vara ansluten till pumpen för att ställa in dina Inställningar för skicka samt skicka dina resultat.

Skicka en bolusdos till pumpen

Med Bolus-funktionen kan du skicka en manuell eller förinställd bolus från din mätare till din pump, om din pump och mätare är ihopkopplade.

Du kan skicka en manuell eller förinställd bolusdos från testresultatskärmen eller från huvudmenyn.


Se bruksanvisningen till din MiniMed insulinpump för anvisningar om hur man slår på/av funktionen Fjärrbolus på pumpen.

OBSERVERA: För att kunna ta en bolusdos med mätaren måste du vara ansluten till pumpen OCH funktionen Fjärrbolus på pumpen måste vara PÅ. Fjärrbolus är PÅ som standard på pumpen. Se bruksanvisningen till din MiniMed insulinpump för mer information.

Om pumpfunktionen **Barnspärr** är PÅ blir du tillfrågad om du vill gå vidare med bolusdosen. Barnspärr är en inställning på MiniMed-pumpen som begränsar åtkomsten till viktiga pumpinställningar. Se bruksanvisningen till din MiniMed insulinpump för mer detaljerade instruktioner.



1. Medan testresultatet fortfarande visas på mätaren, tryck på **Bolus**.

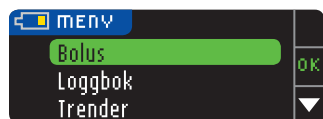

ELLER tryck på **Bolus** i huvudmenyn.



2. På nästa skärm trycker du på **Manuell bolus** eller **förinställd bolus**.
3. Skärmen Anslut till pump visas.

För att ta en manuell bolusdos, fortsätt med steg 4 nedan.
För att ta en förinställd bolusdos, fortsätt med steg 4 på sidan 27.

Manuell bolus



4. Välj därefter bolusdos.

OBSERVERA: Inställd bolusökning på mätaren styrs av inställningen på din MiniMed insulinpump. Du kan ställa in ökningar med 0,1, 0,05 eller 0,025 enheter på pumpen.



5. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att ställa in önskad bolusdos. Tryck sedan på **OK**.


OBSERVERA: Tryck på och håll knappen ▲ eller ▼ intryckt för att bläddra igenom listan snabbare.



6. Tryck på **Ja** för att skicka bolusdosen till pumpen.



7. En bekräftelse visas på både mätaren och pumpen.

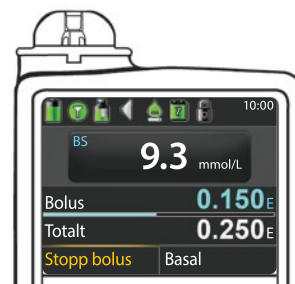


OBSERVERA: Kontrollera att den bolusdos som visas på mätaren motsvarar den totaldos som visas på pumpen.

Förinställd bolus

Följ först steg 1, 2 och 3 på sidan 26.

4. Välj därefter den Förinställda bolus du vill skicka till din pump.



OBSERVERA: Förinställd bolus är inställd på din pump.

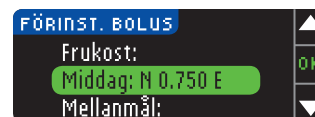

5. Tryck på knappen ▲ eller ▼ till dess ditt förinställda bolus-val markeras. Tryck därefter på **OK**.



6. Tryck på **Ja** för att skicka bolusdosen till pumpen.

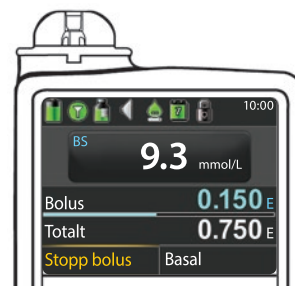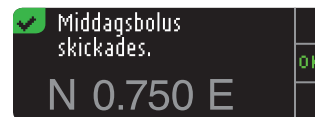


7. En bekräftelse visas på både mätaren och pumpen.

Påminnelsefunktion


En påminnelse om nästa test kan ställas in direkt efter ett test eller via Inställningsmenyn (se sidan 43).

En påminnelse kan ställas in i steg om 15 minuter, från 15 minuter till 23 timmar och 45 minuter.

Ställa in en Testpåminnelse

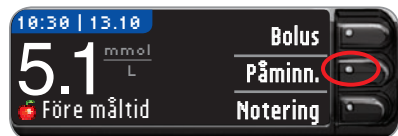

1. Tryck på knappen **Påminn.** med teststicken fortfarande kvar i mätaren.

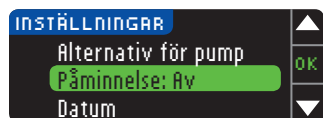

- ELLER** tryck på knappen ▼ för att markera **Påminnelse:**
Av. Tryck på **OK** för att slå PÅ Påminnelsen.



2. Tryck på **Starta** för att påbörja nedräkningen. Förinställd tid är 2 timmar, eller om du har ändrat detta, den senaste påminnelsetid som du ställt in.




Du kan ändra nedräkningstiden för påminnelser till önskad tid genom att trycka på **Ändra**.


Stänga av en testpåminnelse

En påminnelse kan stängas av eller ändras efter ett test eller via Inställningsmenyn.

OBSERVERA: Om du utför ett blodsockertest inom 15 minuter före en inställd påminnelse kommer påminnelsen att stängas av automatiskt.

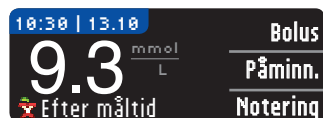

1. Tryck på **Påminnelse** Om nedräkning pågår står det "Påminnelse om:" på skärmen, och återstående tid visas.

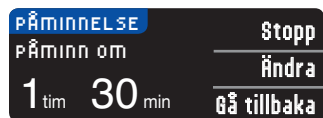

2. Tryck på **Stopp** för att stoppa nedräkningen. En bekräftelse visas och nedräkningen avbryts.

Ändra Påminnelsetiden

1. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja korrekta timmar och minuter (i steg om 15 minuter).



2. Tryck på **OK** efter varje val.



En skärm bekräftar Nedräkningstiden till Påminnelsen.


När funktionen Påminnelse är på visas klocksymbolen i rubrikerna på Inställnings- och Huvudmenyerna.

Mätaren behåller inställd påminnelsetid tills du ändrar den eller stänger av.

Få påminnelse

När påminnelsetiden nås hörs 20 pip. Mätaren sätts på och påminnelsekärmen visas.

Du kan stoppa pipandet på två sätt:

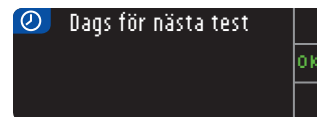

1. Tryck på **OK**, sätt i en teststicka och fortsätt med att testa, ELLER
2. Sätt i en teststicka och fortsätt med att testa (se sidan 13).

OBSERVERA: Om du testar inom 15 minuter före påminnelsetiden stoppas nedräkningen när teststicken förs in. Fortsätt med att testa.

Noteringar

Du kan lägga till noteringar till dina testresultat som kan hjälpa dig att tolka dem. Dina noteringar sparas i Loggboken. Möjligheten att lägga till en notering är endast tillgänglig direkt efter ett testresultat.

1. På testresultatskärmen trycker du på **Notering**.




2. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att bläddra genom valmöjligheterna. Vissa är kanske inte synliga förrän du bläddrar nedåt. Tryck **OK** när ditt val är markerat. En bekräftelse visas.

OBSERVERA: När du väljer Efter måltid kommer Tid efter måltid att vara valbart. Välj Tid efter måltid, och du kan därefter ställa in tiden från 15 minuter till 3 timmar.

När bekräftelsen försvinner kan du ta bort noteringen eller lägga till en eller flera nya noteringar genom att upprepa ovanstående steg. Noteringarna visas längst ned så att du kan läsa alla. Även om du kan lägga till mer än en notering kan endast ett AutoLog-alternativ väljas (t.ex. Fastar, Före måltid eller Efter måltid).

Använda huvudmenyn

Det finns 4 alternativ i huvudmenyn: Bolus, Loggbok, Trender och Inställningar. För att välja ett alternativ, tryck på knappen ▲ eller ▼ för att bläddra till det val du önskar. Tryck på **OK** när ditt val är markerat.

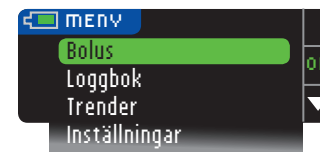

Bolus

Med Bolus-funktionen kan du skicka en Manuell eller Förinställd Bolus från din mätare till din pump, om din pump och mätare är ihopkopplade.

Du kan skicka en bolus från huvudmenyn eller direkt efter att du fått ditt blodsockerresultat.

Om din pump och mätare ännu inte är ihopkopplade och du väljer Bolus, blir du tillfrågad om du vill ansluta till en pump. Du kan endast skicka en bolus till pumpen om du har aktiverat Fjärrbolus på pumpen.

Om **Barnspärr** är aktiverat på din pump, blir du tillfrågad om du vill fortsätta med bolus. Barnspärr är en inställning på MiniMed insulinpump som begränsar tillgången till kritiska pump-inställningar. Läs i din bruksanvisning till MiniMed insulinpumpen för mer detaljerade instruktioner.

OBSERVERA: För att kunna ta en bolusdos från mätaren måste du vara ansluten till pumpen OCH funktionen Fjärrbolus på pumpen måste vara PÅ. Fjärrbolus är PÅ som standard på pumpen.

För stegen för att skicka en bolus till din pump, se sidan 25.

Loggbok

Loggboken innehåller blodsockerresultat och noteringar du har gjort om dessa resultat.

Loggboken rymmer upp till 1 000 resultat. När maxantalet har nåtts tas det äldsta testresultatet bort när ett nytt test görs och sparas i Loggboken. Ett ljud anger den senaste inmatningen.

1. För att granska poster i loggboken, tryck och håll in den övre **Meny**-knappen för att sätta på mätaren.
2. Tryck på knappen ▼ för att markera Loggbok. Tryck på **OK** för att välja.



3. Du kan bläddra igenom alla dina lagrade testresultat med knappen ▼.

När du kommer till den äldsta posten visas Loggbok slut.

Trender (Medelvärden och Sammanfattningar)

Funktionen Trender visar dina medelvärden och resultat jämfört med dina mål under den tidsperiod du väljer. Alternativen för medelvärden är 7, 14, 30 och 90 dagar. Din mätare har ställts in på 14 dagars medelvärden, men du kan ändra detta under Trendintervall i Inställningsmenyn (se sidan 51).

Ditt medelvärde för 90 dagar är inte avsett att återspegla ditt HbA1c-värde.

Skärmen visar det totala antalet testresultat som ingår i medelvärdet och antalet tester över ↑, inom ✓ och under ↓ målet.

Visa Trender med AutoLog Av

Din mätare har förinställts på 14 dagars medelvärde. Du kan ändra tidsintervallet för Trender till 7, 30 eller 90 dagar under Inställningar.


1. Tryck på och håll **Meny**-knappen nedtryckt för att sätta på mätaren.
2. Tryck på knappen ▼ för att markera **Trender**. Tryck på **OK** för att välja.



3. Tryck på knappen ▼ för att visa skärmen **14 dagars resultat**.

Visa Trender med AutoLog på

1. Tryck på och håll **Meny**-knappen nedtryckt för att sätta på mätaren.
2. Tryck på knappen ▼ för att markera **Trender**. Tryck på **OK** för att välja.

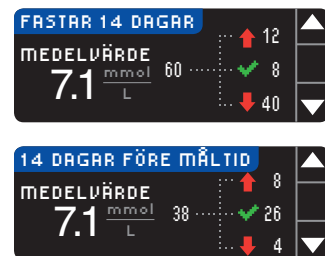

3. Tryck på knappen ▼ för att visa 14 dagars medelvärde för fastar. Om du har markerat några testresultat som Fastar, ser du ditt medelvärde för Fastar först.
4. Tryck på knappen ▼ för att gå till medelvärdet för 14 dagar Före måltid.

I detta exempel visas att ditt medelvärde Före måltid är 7,1 mmol/L och att 38 testresultat ingår i medelvärdet - med 26 värden inom ✓ målintervallet, 8 över ↑ målintervallet och 4 under ↓ målintervallet.



5. Tryck på knappen ▼ för att gå till medelvärdet för 14 dagar Efter måltid.




6. Tryck på knappen ▼ för att gå till skärmen 14 dagars resultat.

Inställningar

Du kan granska och ändra alternativen på din mätare och anpassa den i menyn Inställningar.

1. Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
2. Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

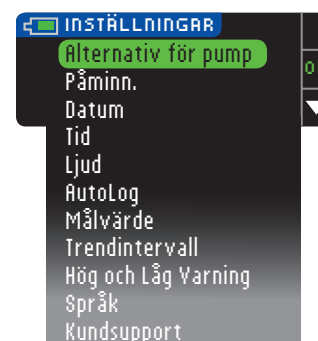

Aktuella inställningar i mätaren för **Påminnelse**, **Datum**, **Tid**, **Ljud** och **AutoLog** kan visas genom att bläddra igenom alternativen i menyn Inställningar. För att visa andra tillgängliga inställningar eller för att göra ändringar, välj alternativet med knapparna ▲ och ▼ och tryck på **OK**.

Alternativ för pump

Med hjälp av Alternativ för pump kan du ansluta eller koppla ifrån en MiniMed insulinpump och ändra dina Inställningar för skicka (hur dina blodsockermätningar skickas till pumpen).

Ansluta mätaren och pumpen


Du kan skicka blodsockermätningar och en fjärrbolusdos till din pump om mätaren och pumpen är anslutna till varandra.

Det finns två sätt att ansluta mätaren till pumpen: **Manuell anslutning** och **Autoanslutning**. Använd **Autoanslutning** för att snabbt ansluta till pumpen. Använd **Manuell anslutning** om det finns andra Medtronic-enheter i närheten. Vid **Manuell anslutning** blir du uppmanad att ange enhetens (mätarens) serienummer så att pumpen kan hitta den. Vid **Autoanslutning** behöver du inte ange något serienummer. Mätaren och pumpen söker efter varandra, och du behöver bara bekräfta serienumren för att göra kopplingen.


Ansluta pumpen med Autoanslutning

OBSERVERA: Placera mätaren och pumpen sida vid sida innan du påbörjar anslutningsprocessen. Du måste växla mellan de båda enheterna för att slutföra anslutningen.


1. Håll **Meny**-knappen nedtryckt för att slå på mätaren.
2. Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

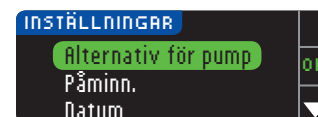


3. Tryck på knappen ▼ för att markera **Alternativ för pump**. Tryck på **OK** för att välja.

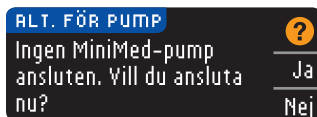

4. Skärmarna Ansluta till pumpen visas sedan. Tryck på **Ja** för att ansluta till en MiniMed insulinpump nu.

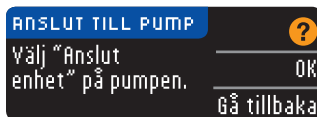


5. Tryck på **OK**. Lagg ned mätaren.

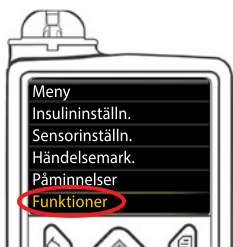


6. **Ta upp pumpen.** Tryck på en godtycklig knapp för att sätta på skärmen, och tryck därefter på **Meny**-knappen . Använd nedpil för att bläddra till **Funktioner**. Tryck på knappen Välj .


OBSERVERA: Om pumpskrmen stängs av, tryck på valfri knapp för att slå på den igen.

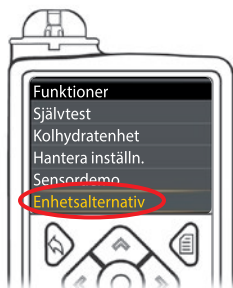


7. Använd nedpilen i menyn Funktioner för att bläddra till **Enhetsalternativ**. Tryck på knappen Välj .

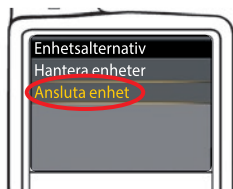

8. Bläddra till **Ansluta enhet** i menyn Enhetsalternativ. Tryck på knappen Välj .

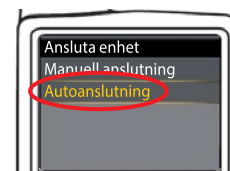


9. Placera mätaren och pumpen bredvid varandra. Välj **Autoanslutning** på pumpen.

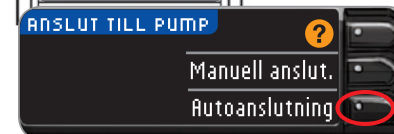

Välj **Autoanslutning** på mätaren.


OBSERVERA: Med Autoanslutning söker mätaren automatiskt efter en pump. Med Manuell anslutning anger du din mätares serienummer på pumpen. Se sidan 38 för information om manuell anslutning.

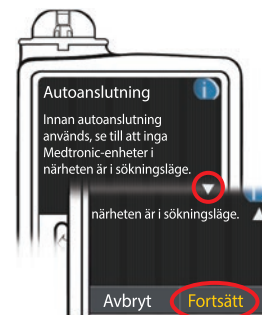

10. Läs på pumpens skärm. Se till att andra Medtronic-enheter i närheten INTE är i sökläge. Använd nedpil för att bläddra till nästa sida. Använd pilknapparna för att bläddra till **Fortsätt**. Tryck på knappen Välj .




11. Placera mätaren och pumpen bredvid varandra. Välj **Sök** på pumpen.

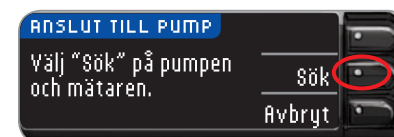

Välj **Sök** på mätaren.




Sökningen kan ta upp till 2 minuter.

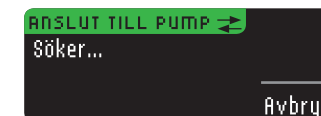



12. Kontrollera att SN (serienumret) på **pump**skärmen överensstämmer med **mätarens** SN på **mätarens** skärm. Om de överensstämmer, bläddra till **Bekräfta** på pumpen. Tryck på knappen Välj.

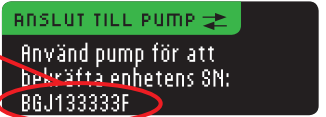


När pumpen ansluts till mätaren ändras SN på **mätarens** skärm till ett annat serienummer. Detta nummer är **pumpens** SN.



13. Vänd på pumpen. Kontrollera att SN på pumpens baksida överensstämmer med pumpens serienummer som nu syns på **mätarens** skärm.



14. Bekräftelseskärmen visas kortvarigt på din pump, följt av skärmen Hantera enheter.

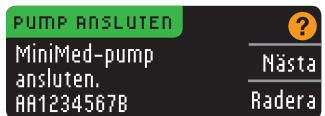

15. Tryck därefter på **Nästa** på din mätare.

OBSERVERA: För att ta bort denna pump, tryck på **Radera**. Processen för att ansluta till pump börjar om, så att du kan ansluta till en annan pump.




16. Tryck och håll nere knappen **Tillbaka** på pumpen för att återvända till hemskrmen. Lägga ner pumpen och plocka upp mätaren.


17. När mätaren och pumpen har kopplats samman ska du ställa in dina **Inställningar för skicka**. Detta styr hur din mätare skickar blodsockerresultat till din MiniMed insulinpump. Välj den **Inställning för skicka** som passar dig bäst.

Alternativen är:

Alltid	Mätaren skickar alltid resultaten
Fråga mig	Mätaren frågar dig innan den skickar resultaten
Aldrig	Mätaren skickar aldrig resultaten

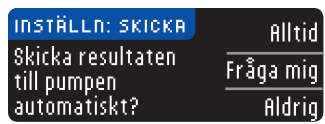

Ditt val kan ändras senare via Inställningar (se sidan 42).

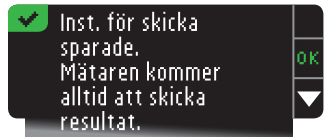


18. På nästa skärm bekräftas dina Inställningar för skicka. Tryck på **OK**.

I detta steg väljer du hur datum och tid ska visas på din mätare.

OBSERVERA: Din pump styr automatiskt datumet och tiden. Om dessa behöver ändras på din pump, se din bruksanvisning för MiniMed insulinpump. Det datumformat du väljer på mätaren gäller bara för mätaren.



19. **Datumformat**-skärmen kommer upp. Välj ditt datumformat.

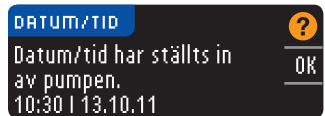


20. När du gjort ditt val visas en bekräftelse. Tryck på **OK** för att bekräfta, och återgå till Inställnings menyn.

Ansluta pumpen med Manuell anslutning


OBSERVERA: Placera mätaren och pumpen sida vid sida innan du börjar. Du måste växla mellan de båda enheterna för att slutföra anslutningen.

Se sidan 33 för stegen vid Autoanslutning.


1. Håll **Meny**-knappen nedtryckt för att slå på mätaren.
2. Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

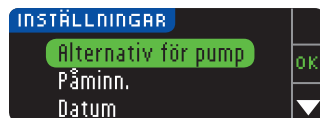


3. Tryck på knappen ▼ för att markera **Alternativ för pump**. Tryck på **OK** för att välja.

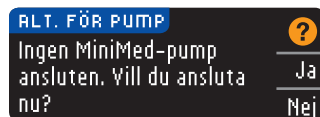

4. Skärmen **Alternativ för pump** visas och frågar om du vill Ansluta nu. Tryck på **Ja**.

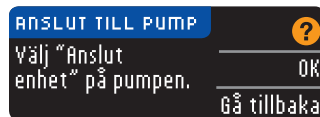


5. Tryck på **OK**. Lagg ned mätaren.

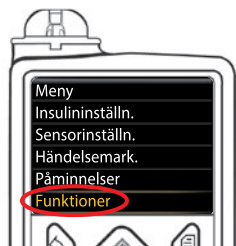


6. Ta upp pumpen.

Tryck på valfri knapp för att slå på skärmen och tryck sedan på knappen **Meny**. Använd nedpil för att bläddra till **Funktioner**. Tryck på knappen Välj.


OBSERVERA: Om pumpskrmen stängs av, tryck på valfri knapp för att slå på den igen.

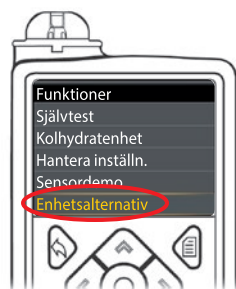


7. Använd nedpilen i menyn **Funktioner** för att bläddra till **Enhetsalternativ**. Tryck på knappen Välj.

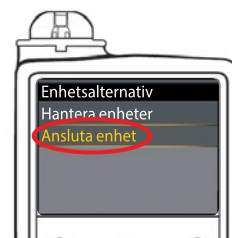


8. Bläddra till **Anslut enhet** i menyn Enhetsalternativ. Tryck på knappen Välj.

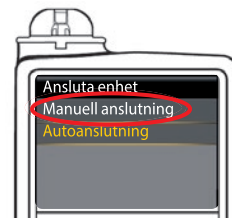

9. Placera mätaren och pumpen bredvid varandra. Välj **Manuell anslutning** på pumpen. Välj **Manuell anslutning** på mätaren.

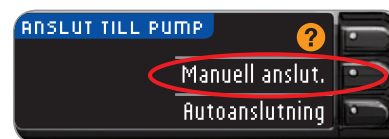


10. Ta upp pumpen. Ange mätarens serienummer (SN) som visas på mätaren i pumpen. Använd knapparna upp och ned för att välja tecken och tryck sedan på höger-knappen för att gå till nästa tecken. Fortsätt att trycka uppåt för att komma till alfabetet. Tryck nedåt för att gå åt andra hållet (börja med "Z"). Tryck på knappen Välj när du angett det sista tecknet i SN. Välj **OK** på pumpen.

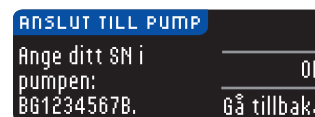



Tryck på **OK** på mätaren efter att du angett hela mätarens SN i pumpen.




11. Placera mätaren och pumpen bredvid varandra. Välj **Sök** på pumpen. Välj **sök** på mätaren.

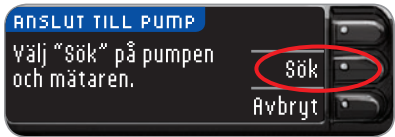

Sökningen kan ta upp till 2 minuter.

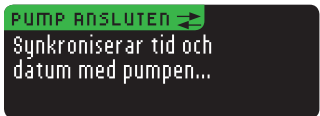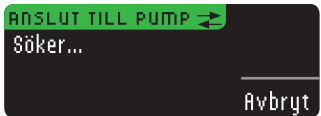

12. Mätaren söker efter pumpen. När den hittar pumpen synkroniserar mätaren tid och datum med pumpen.

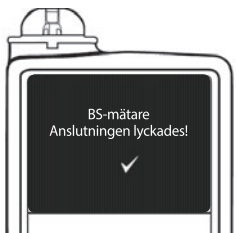

13. På nästa skärm på båda enheterna bekräftas att mätaren och pumpen är anslutna.




14. Tryck på **Nästa** på mätaren.


Om du just har anslutit till en pump för första gången kommer du tillbaka till Grundinställning, Mätarens Inställningar för skicka, Steg 17 (sidan 10).

Inställningar för skicka styr hur din mätare skickar dina testresultat till pumpen. Du har 3 valmöjligheter:

Alltid	Mätaren skickar alltid resultaten
Fråga mig	Mätaren frågar dig innan den skickar resultaten
Aldrig	Mätaren skickar aldrig resultaten

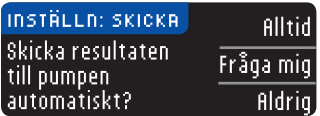

15. Välj den Inställning för skicka som passar dig bäst.

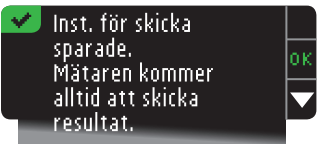


16. På nästa skärm bekräftas dina val. Tryck på **OK**.



17. Skärmen Datumformat visas. Välj ditt datumformat.



18. När du gjort ditt val visas en bekräftelse. Tryck på **OK**.

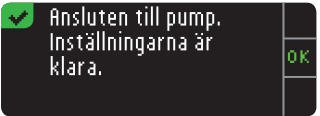

19. Tryck på **OK** för att bekräfta och återvända till Inställningsmenyn.

Ändra Inställningar för skicka


OBSERVERA: Mätaren måste vara ansluten till din MiniMed insulinpump för att man ska kunna ställa in eller ändra Inställningar för skicka.

Inställningar för skicka styr hur din mätare skickar dina testresultat till pumpen. Du har 3 valmöjligheter:


Alltid	Mätaren skickar alltid resultaten
Fråga mig	Mätaren frågar dig innan den skickar resultaten
Aldrig	Mätaren skickar aldrig resultaten

OBSERVERA: Om du inte vill skapa en trådlös signal (t.ex. om du blivit ombedd att stänga av all elektronisk utrustning ombord på ett flygplan), kanske du vill testa med Inställningar för skicka inställt på Aldrig.

- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

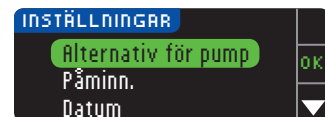


- Tryck på knappen ▼ för att markera **Alternativ för pump**. Tryck på **OK** för att välja.

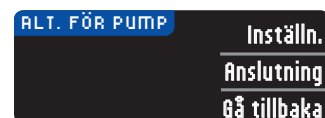


- Tryck på **Inställn.**


OBSERVERA: För anslutningsinställningar, se sidan 33.

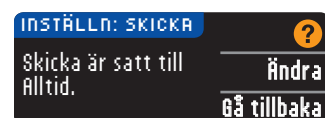

- För att ändra aktuell Inställning för skicka, tryck på **Ändra**.

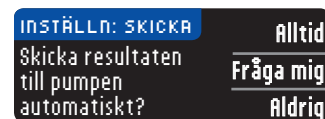

- Välj den Inställning för skicka som passar dig bäst.

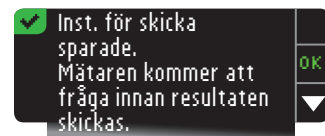


- En bekräftelse visas. Tryck på **OK** för att återgå till Alternativ för pump.


Titta på eller koppla från din pumpanslutning

Din mätare måste vara ansluten till din MiniMed insulinpump för att du ska kunna se pumpanslutningen eller koppla bort pumpen.


- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

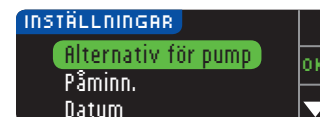


- Tryck på knappen ▼ för att markera **Alternativ för pump**. Tryck på **OK** för att välja.

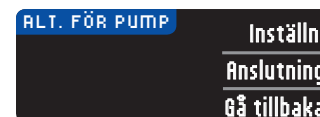


- Tryck på **Anslutning**.

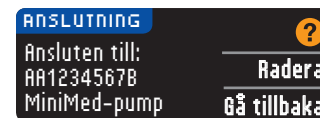

- För att koppla bort den pump som visas, tryck på **Radera**.

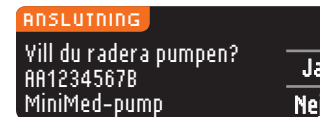

- Tryck på **Ja** för att bekräfta att du vill ta bort pumpen.

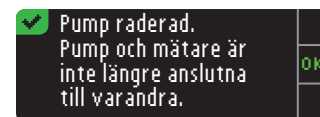


- En bekräftelse visas. Tryck på **OK** för att återgå till Inställningar.

Påminnelsefunktion


En påminnelse om nästa test kan ställas in efter att du gjort ett test eller via Inställningsmenyn. Se sidan 28 om hur man ställer in en testpåminnelse efter test.

Ställa in en Påminnelse


- Tryck på och håll **Meny**-knappen nedtryckt för att sätta på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

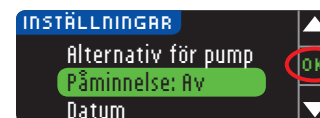

- Tryck på knappen ▼ för att markera **Påminnelse: Av**. Tryck på **OK** för att slå PÅ påminnelsen.

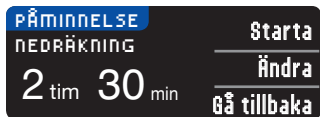

- Om du vill acceptera den förinställda tiden som visas väljer du **Starta**. Om du vill ändra tiden väljer du **Ändra**. Du kan ändra påminnelsetiden i 15-minuters steg, från 15 minuter till 23 timmar och 45 minuter.

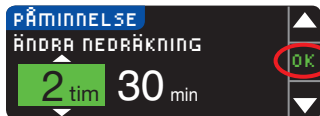

- Tryck på **OK** när du valt timmar. Tryck på **OK** när du valt minuter.



- En bekräftelse visas där du kan välja **Ändra** eller **Klart**.


Om du accepterar påminnelsen visas en påminnelseikon ⓘ vid rubrikerna Inställningar och Huvudmeny.

OBSERVERA: Om du testar inom 15 minuter före påminnelsetiden, stoppas nedräkningen när teststickan förs in.

Stänga AV en Påminnelse

Om du vill stänga av en påminnelse kan du göra detta i menyn Inställningar eller utföra ett blodsockertest inom 15 minuter före den inställda tidpunkten för påminnelsen. Så här använder du menyn Inställningar:


- Tryck på och håll **Meny**-knappen nedtryckt för att sätta på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

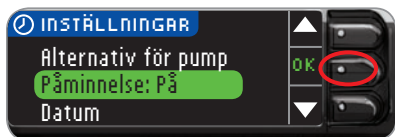

- Tryck på knappen ▼ för att markera **Påminnelse: På**. Tryck på **OK** för att stänga AV påminnelsen.



- Välj **Stopp**. En bekräftelse visas och nedräkningen avbryts.

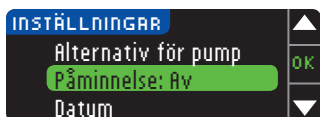

- Påminnelsen har nu stängts av.

Datum och tid

Ställa in datum (när du inte är ansluten till en pump)

Du kan bara ställa in datum och tid på mätaren när mätaren **INTE** är ansluten till en pump. Om mätaren är ansluten till en pump ställs datum och tid in på pumpen (se Ställa in datum och tid när du är ansluten till en pump, sidan 46).

- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.



- Tryck på knappen ▼ för att markera **Datum**. Tryck på **OK** för att välja.




- Om du vill ändra datumet trycker du på **Ändra**.



- Välj ett av formaten **Månad/Dag/År** eller **Dag.Månad.År**.



- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja rätt år, månad och dag. Tryck på **OK** efter varje val.

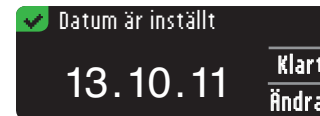


- Datumet du angav visas på skärmen. Tryck på **Klart** om datumet är korrekt.

Ställa in tid (när du inte är ansluten till en pump)

Du kan bara ställa in datum och tid på mätaren när mätaren **INTE** är ansluten till en pump. Om mätaren är ansluten till en pump ställs datum och tid in på pumpen (se Ställa in datum och tid när du är ansluten till en pump, sidan 46).

- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

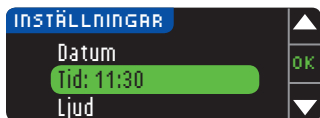

- Tryck på knappen ▼ för att markera **Tid**. Tryck på **OK** för att välja.



- Tryck på **Ändra** för att ändra tid.



- Välj ett av alternativen **12-timmarsklocka** eller **24-timmarsklocka**.



- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja rätt timme och minut. Tryck på **OK** efter varje val.
- Om du har valt formatet **12-timmars klocka**, trycker du på knappen ▲ eller ▼ för att välja **AM** eller **PM**.




- Tiden är inställd. En bekräftelse visas. Tryck på **Klart**.

Om detta är första gången du ställer in datum och tid, gå tillbaka till **Grundinställning, AutoLog, steg 21 (sidan 10)**.

Ställa in datum och tid (när en pump är ansluten)

När en pump är ansluten kan du ändra datum och tid på pumpen. Datumet och tiden synkroniseras med pumpen när mätaren först ansluts till pumpen, när ett blodsockerresultat skickas till pumpen, eller om du väljer **Datum** eller **Tid**-alternativet i Inställningsmenyn.

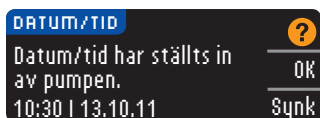

- När pumpen är ansluten kan du bara ändra hur datumformatet visas på mätaren.
- Tryck på **Synk** för att synkronisera mätaren med det datum och den tid som är inställda på pumpen.


OBSERVERA: Denna ändring av datumformat gäller endast för mätaren (inte pumpen).

Ljud

Sätta PÅ/Stänga AV ljudet

När du får din mätare är Ljud PÅ. Vissa felmeddelanden och påminnelseklockan ignorerar inställningen Ljud Av.

- Tryck på och håll **Meny**-knappen nedtryckt för att sätta på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

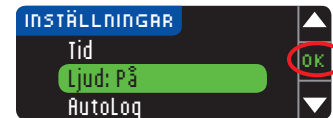

- Tryck på knappen ▼ för att välja **Ljud**. Tryck på **OK**.



- Om du vill stänga av ljudet trycker du på knappen **Stäng av**. Om du vill behålla ljudet på trycker du på **Acceptera**.




En bekräftelse visas.

AutoLog

OBSERVERA: När du får mätaren är AutoLog AV.

Med AutoLog-funktionen kan du markera dina testresultat som

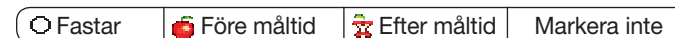


Så här slår du PÅ AutoLog


- Tryck på och håll **Meny**-knappen nedtryckt för att sätta på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.



- Tryck på knappen ▼ för att markera **AutoLog**. Tryck på **OK** för att välja.

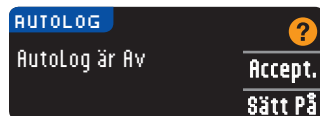

4. Tryck på **Sätt På** för att aktivera AutoLog.

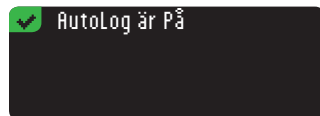

En bekräftelse visas.


OBSERVERA:

- När du ändrar din AutoLog-inställning till **PÅ** blir du ombedd att bekräfta dina inställda målintervall för Fastar, Före måltid samt Efter måltid.
- Ditt testresultat visas inte förrän du gör ett AutoLog-val.
- Om ditt resultat är över eller under dina inställningar för **Hög** och **Låg** varning visas ditt resultat utan att du behöver trycka på någon knapp.


För att stänga Av AutoLog

OBSERVERA: När du får mätaren är AutoLog AV


- Håll **Meny**-knappen nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

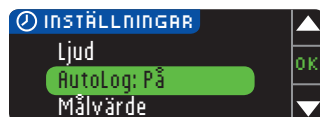

3. Tryck på knappen ▼ för att markera **AutoLog**. Tryck på **OK** för att välja.

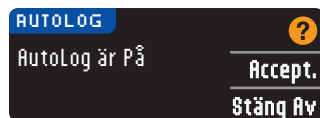

4. Om du vill stänga av AutoLog trycker du på knappen **Stäng Av**.

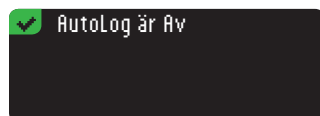

En bekräftelse visas.

OBSERVERA: När du ändrar din AutoLog-inställning till **AV**, blir du ombedd att bekräfta dina Målvärden.

Målintervall för blodsocker

Målintervall (målvärde) är dina personliga områden för blodsockerresultat. När AutoLog är AV har du bara ett målintervall. När AutoLog är PÅ har du målintervall för Fastar, Före måltid och Efter måltid.



VIKTIGT

Rådgör med sjukvårdspersonal innan du ställer in några målintervall på mätaren.


Ändra mål när AutoLog är Av

När AutoLog är AV har du bara ett målintervall. Det kommer förinställt på 3,9 – 10,0 mmol/L.

- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.



3. Tryck på knappen ▼ för att markera **Målvärde**. Tryck på **OK** för att välja.

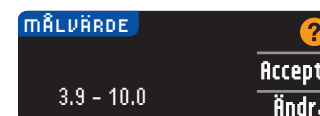

4. Tryck på **Ändra** för att ändra ditt målintervall.



5. Använd knappen ▲ eller ▼ för att ändra värdena i målintervall. Tryck på **OK** efter varje val.



En skärm bekräftar ditt val.

Ändra målintervall med AutoLog på


OBSERVERA: Mål kan bara ställas in inom din/dina valda varningsnivå(er). För ytterligare information, kontakta kundsupport. Kontaktuppgifter till kundsupport finns på det bakre omslaget.

När AutoLog är PÅ kommer din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare förinställd med följande målintervall (målvärde) för testning:


	Fastar	3,9 – 7,2 mmol/L
	Före måltid	3,9 – 7,2 mmol/L
	Efter måltid	3,9 – 10,0 mmol/L

Målintervallen kan ändras till ett personligt mål som bestäms av dig och/eller din sjukvårdspersonal.


- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

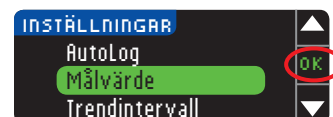

- Tryck på knappen ▼ för att markera **Målvärde**. Tryck på **OK** för att välja.

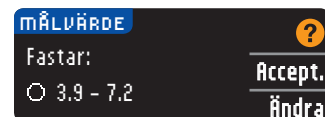


- Om du vill ändra målintervallet (målvärdet) för Fastar trycker du på knappen **Ändra**. Annars trycker du på **Acceptera**.

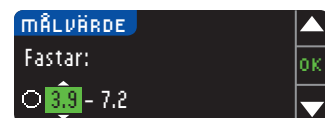

- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att ställa in mål för Fastar. Tryck på **OK** efter varje val.

- Upprepa processen för att ställa in dina personliga mål för Före måltid respektive Efter måltid.

- Tryck på **OK** efter varje val.

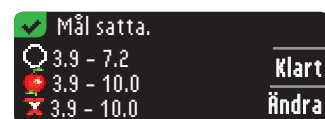


En bekräftelse visar att alla målintervall har ställts in.

Om dessa är korrekta trycker du på **Klart** för att återgå till Inställningsmenyn. För att ändra, välj **Ändra** och upprepa processen.


Trendintervall

Funktionen Trender visar dina medelvärden och resultat jämfört med dina mål under den tidsperiod du väljer. Alternativen för medelvärden är 7, 14, 30 och 90 dagar. Din mätare har ställts in på 14-dagars medelvärde, men du kan ändra detta under Inställningar.

- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

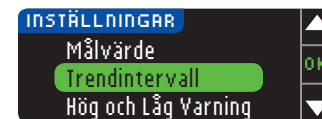

- Tryck på knappen ▼ för att välja **Trendintervall**.
- Tryck på **OK** för att välja.

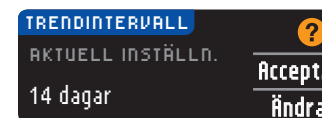

- Din nuvarande inställning visas. Du kan **Acceptera** eller **Ändra** din nuvarande inställning.

OBSERVERA: Ditt medelvärde för 90 dagar är inte avsett att återspegla ditt HbA1c-värde.



- Välj 7, 14, 30 eller 90 dagar med knappen ▼ och tryck sedan på **OK**.
En bekräftelse visas.

Hög och Låg varning

Hög/låg-varning visas om ditt testresultat ligger över eller under den inställning du valt. Varningarna visas som stora, orange siffror. Resultat över Hög markeras med Høgt blodsocker. Resultat under Låg markeras med Lågt blodsocker.


OBSERVERA: Varningar kan bara ställas in utanför ditt/dina valda målintervall. För ytterligare information, kontakta kundsupport. Kontaktuppgifter till kundsupport finns på det bakre omslaget.




VIKTIGT

Rådgör med sjukvårdspersonal innan du ställer in Höga och Låga varningsnivåer på mätaren.

- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen ▼ för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.

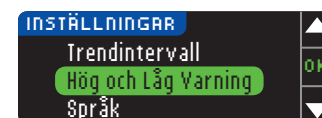

- Tryck på knappen ▼ för att markera **Hög och Låg Varning**. Tryck på **OK** för att välja.

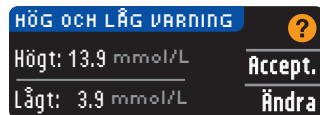


4. Välj **Acceptera** för att använda de nivåer för Höga och Låga varningar som är förinställda (eller valdes vid den första inställningen). Det förinställda värdet för Hög varning är 13,9 mmol/L och det förinställda värdet för Låg varning är 3,9 mmol/L.

5. Välj **Ändra** för att ändra varningsnivåer.



6. Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att ställa in dina Höga och Låga varningsnivåer. Tryck på **OK** efter varje val.

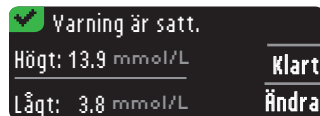

7. På nästa skärm bekräftas dina val. Tryck på **Klart**.


Ställa in språk

- Tryck på och håll knappen **Meny** nedtryckt för att slå på mätaren.
- Tryck på knappen **▼** för att markera **Inställningar**. Tryck på **OK** för att välja.


Dessa mätarskärbilder är endast för illustrativa syften.



3. Tryck på knappen **▼** för att markera **Språk**. Tryck på **OK** för att välja.

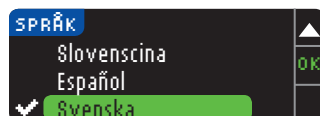

4. Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja önskat språk. Tryck på **▼** för att se fler alternativ. Tryck på **OK**.

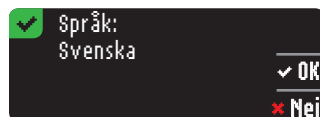

5. Kontrollera att ditt språk visas. Tryck på **OK** för att bekräfta.
Om rätt språk inte visas trycker du på **Nej**.

Kundsupport

Det här alternativet ska användas om du talar med kundsupportpersonal. De kommer att ge dig en kod som gör det möjligt för dem att verifiera vissa inställningar. Koden ska inte användas vid något annat tillfälle. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.

Teknisk service och skötsel

Överföring av data till CareLink® Personal programvara



Du kan lätt överföra blodsockerresultat från din mätare till CareLink Personal programvaran.

Du kan också trådlöst överföra data från din MiniMed insulinpump till CareLink Personal programvaran med hjälp av din CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätare.

- Läs instruktionerna i bruksanvisningen för CareLink Personal programvara om hur du installerar CareLink Personal och laddar de drivrutiner som krävs i din dator.
- Om du kör GLUCOFACETS®DELUXE programvara för analys av blodsockerresultat i din dator måste du avsluta det.
- Starta CareLink Personal. Följ instruktionerna för att ansluta din CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätare till en USB-port på din dator. CareLink Personal kommer automatiskt att hitta CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätare och din MiniMed insulinpump.

Din CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare är också kompatibel med GLUCOFACETS DELUXE-programvara för analys av blodsockerresultat, som kanske inte finns tillgänglig i alla länder.

OBSERVERA: CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren har bara blivit testad för användning med GLUCOFACETS DELUXE programvara för analys av blodsockerresultat och CareLink personal programvara. Ascensia Diabetes Care påtar sig inget ansvar för felaktiga resultat som kan uppstå vid användning av annan programvara.

Kontakta kundsupport för mer information. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.

Felmeddelanden

- Felmeddelanden har alltid ett "E" med ett nummer och visas i skärmens nedre vänstra hörn.




- Om din mätare upptäcker något fel (hårdvara, mjukvara, testfel) piper mätaren två gånger.
- Du kommer att vägledas av specifika instruktioner. I den första raden på felmeddelandeskärmen presenteras felet. På de påföljande raderna förklaras vad du ska göra. När ett felmeddelande visar **OK** trycker du på knappen intill för att fortsätta.
- Kontakta kundsupport om problemet inte går att lösa. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.

Batteriets status

Visning av batteriets status

Batteriets status anges med en batterisymbol  på skärmen. Tillsätt blod samt på Huvudmenyn. Den visar hur laddat batteriet är.

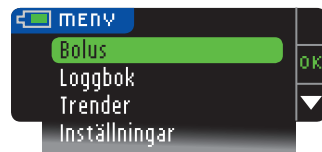

Den här skärmen anger ett fulladdat batteri.



Allteftersom batteriet används blir batterisymbolen på skärmen mindre fylld med färg. Färgen på batterisymbolen blir gul när batteriet är svagt, och därefter röd när batteriet är nästan helt urladdat.



Flera batterivarningar som visas talar om att batteriet är svagt och att du behöver **Ladda batteriet**.



Om du inte laddar batteriet visas meddelandet: "**Stänger av, batteriet är tomt**". Du måste nu ladda omedelbart.

Anslut mätaren till väggladdaren eller datorns USB-port. Se till att datorn är igång och att den inte befinner sig i standby-, vilo- eller energisparläge.

Lampan vid stickporten blinkar medan laddningen pågår och slutar blinka när laddningen är klar. Avlägsna mätaren och förvara den i fodralet tills det är dags för nästa test.

Ladda batteriet

När du ansluter mätaren till väggladdaren eller datorn börjar den omedelbart att laddas. Medan batteriet laddas blinkar lampan vid stickporten långsamt.

Tryck på **Meny**-knappen högst upp när som helst för att visa laddningsstatus.

Snabbbladdning

Om batteriet är svagt när du ansluter mätaren sker en Snabbbladdning på cirka 1 minut. Du kan utföra ett blodsockertest så snart Snabbbladdningen är klar och du har kopplat bort mätaren.



Normalladdning


När Snabbbladdningen är klar förväntas normalladdning pågå i upp till 2 timmar vid anslutning till en högströms USB-port. När batteriet är fulladdat släcks lampan vid stickporten.

OBSERVERA: Tänk på att USB-portarna i vissa datorer och USB-nav med egen strömförsörjning kan bli mycket varmare än rumstemperaturen. Om du vill göra en mätning omedelbart efter att du kopplat ifrån datorn, använd USB-sladden för att skydda mätaren från värmeexponering från datorn.


OBSERVERA: Om laddningsstatusen anger "Enbart laddning", kan din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare ha anslutits till en USB-port med lägre strömkapacitet. Försök med en annan USB-port på din dator. Anslut endast till en dator eller 5 V-laddare som är CE-märkt.

Slut på mätarens livslängd/Avlägsnande av batteriet

OBSERVERA: Utför endast den här proceduren om du inte tänker använda mätaren längre. När du har öppnat och avlägsnat batteriet fungerar inte mätaren längre.

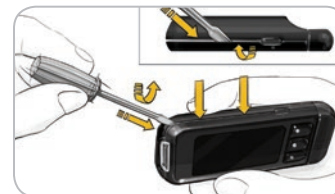

Om du vill ta ut batteriet för att kassera det på korrekt sätt, måste du bända isär de övre och nedre höljen. För in spetsen på en skruvmejsel nära stickans öppning och vrid skruvmejseln så att höljet tvingas isär. Fortsätt så här längs sidan tills det övre höljet har lossats.

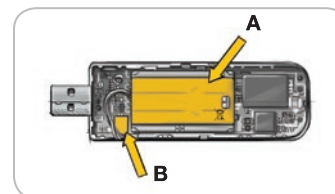

Bänd upp det uppladdningsbara batteriet här (A). Koppla bort batteriet genom att dra ut batteriets anslutningsdon (B).

Kassera mätaren och litium-polymerbatteriet i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.

Symtom på högt eller lågt blodsocker

Du kan tolka testresultaten bättre om du känner till symtomen på högt och lågt blodsocker. Några av de vanligaste symtomen är:

Lågt blodsocker (Hypoglykemi):	Högt blodsocker (Hyperglykemi):	Ketoner (ketoacidosis):
- Skakningar - Svettningar - Snabb puls - Dimsyn - Förvirring - Svimmar - Irritation - Anfall - Extrem hunger - Yrsel	- Frekvent urintömning - Mycket törstig - Dimsyn - Ökad trötthet - Hunger	- Andfåddhet - Illamående eller kräkningar - Svår muntorrhet



VIKTIGT

Om du har några av de här symtomen ska du testa blodsockret. Om testresultatet är under 2,8 mmol/L eller över 13,9 mmol/L ska du omedelbart kontakta sjukvården.

För ytterligare information och en fullständig lista över symtom, kontakta sjukvårdspersonal.

Teknisk information

Noggrannhet

CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker har testats på 100 kapillära blodprov med användning av 600 CONTOUR®NEXT-teststickor. Två replikat testades med var och en av 3 loter CONTOUR NEXT-teststickor för totalt 600 avläsningar. Resultaten jämfördes med YSI® glukosinstrumentet, som är spårbar enligt CDC-hexokinasmetoden.⁸ Tabellerna nedan jämför prestandan av de 2 metoderna.

Tabell 1 — Systemets noggrannhetsresultat för glukoskoncentration < 5,55 mmol/L

Inom ± 0,28 mmol/L	Inom ± 0,56 mmol/L	Inom ± 0,83 mmol/L
160 av 186 (86,0 %)	183 av 186 (98,4 %)	186 av 186 (100 %)

Tabell 2 — Systemets noggrannhetsresultat för glukoskoncentration ≥ 5,55 mmol/L

Inom ± 5%	Inom ± 10%	Inom ± 15%
307 av 414 (74,2 %)	411 av 414 (99,3 %)	414 av 414 (100 %)

Tabell 3 — Systemets noggrannhetsresultat för glukoskoncentrationer mellan 2,0 mmol/L och 26,5 mmol/L

Inom ± 0,83 mmol/L eller ± 15 %	600 av 600 (100 %)
---------------------------------	--------------------

Enligt Acceptanskriterier i ISO 15197: 2013 ska 95 % av alla skillnader i blodsockervärden (dvs. mellan referensmetod och mätare) vara inom ± 0,83 mmol/L för blodsockervärden som är mindre än 5,55 mmol/L och inom ± 15 % för blodsockervärden som är större än eller lika med 5,55 mmol/L.

Användarnoggrannhet

En studie som utvärderar blodsockervärden i kapillära blodprov från fingertoppen erhållna av 218 lekmän visade följande resultat: 100 % inom ± 0,83 mmol/L av medicinska laboratorievärden vid blodsockerkoncentrationer under 5,55 mmol/L och 98,4 % inom ± 15 % av medicinska laboratorievärden vid blodsockerkoncentrationer vid eller över 5,55 mmol/L.

Precision

En Repeterbarhetsstudie utfördes med CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätsystem för blodsocker med användning av 5 venösa helblodsprover med blodsockernivåer från 2,2 till 18,5 mmol/L. Flera replikat (n=300) testades med användning av flera CONTOUR NEXT LINK 2.4-blodsockermätare och 3 loter CONTOUR®NEXT-blodsockerteststickor. Följande precisionsresultat erhöles.

Tabell 4 — Systemets Repeterbarhetsresultat för CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare med användande av CONTOUR NEXT teststickor

Medelvärde, mmol/L	Standardavvikelse, mmol/L	95 % konfidensintervall av standardavvikelse, mmol/L	Variationskoefficient, %
2,20	0,04	0,040-0,047	2,0
4,48	0,06	0,053-0,063	1,3
6,79	0,09	0,082-0,097	1,3
11,36	0,16	0,143-0,170	1,4
18,34	0,25	0,232-0,274	1,4

Intermediär precision (vilket inkluderar variabilitet över flera dagar) utvärderades med användning av 3 kontrollöslningar. Med var och en av 3 loter CONTOUR NEXT-teststickor, testades varje kontroll en gång på var och en av 10 instrument på 10 olika dagar för totalt 300 avläsningar.

Tabell 5 — Systemets intermediära precisionsresultat för CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare med användning av CONTOUR NEXT-teststickor

Kontrollnivå	Medelvärde, mmol/L	Standardavvikelse, mmol/L	95 % konfidensintervall av standardavvikelse, mmol/L	Variationskoefficient, %
Låg	2,57	0,041	0,038 – 0,045	1,6
Normal	7,23	0,114	0,105 – 0,124	1,6
Hög	21,60	0,366	0,338 – 0,400	1,7

Mätprincip

Blodsockertest med CONTOUR®NEXT LINK 2.4 blodsockermätare baseras på mätning av den elektriska ström som uppstår när glukos reagerar med reagenserna på stickans elektrod. Blodprovet sugas upp i spetsen på teststickan genom kapillärkraft. Glukos i provet reagerar med FAD glukosdehydrogenas (FAD-GDH) och mediatorn. Elektroner genereras, vilket skapar en elström som är proportionell mot mängden glukos i provet. Efter reaktionstiden visas glukoskoncentrationen i provet. Ingen beräkning behövs.

Jämförelsealternativ

CONTOUR NEXT LINK 2.4-systemet har utformats för att användas med kapillärt helblod. Jämförelse med en laboratoriemetod måste utföras samtidigt och från samma blodprov. Observera: Blodsockerkoncentrationen faller snabbt på grund av glykolys (cirka 5–7 % per timme).⁹

Serviceinformation

Om du har problem som inte kan lösas med problemlösningssinformationen på mätaren, kontakta kundsupport. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget. Vi har utbildade specialister som kan hjälpa dig.

Viktigt

Tala med en kundsupport-representant innan du returnerar mätaren, oavsett orsak. Han/hon kommer att ge dig den information som krävs för att du ska kunna hantera problemet korrekt och effektivt.

Se till att ha din CONTOUR®NEXT LINK 2.4 blodsockermätare och CONTOUR®NEXT teststickor tillgängliga när du ringer. Det underlättar också om du har en flaska med CONTOUR®NEXT-kontrollösning avsedd för teststickorna i närheten.

Checklista

Den här checklisten kan vara bra att ha vid samtalet med kundsupport:

1. Leta reda på modellnumret (**A**) och serienumret (**B**) på mätarens baksida.
2. Leta reda på teststickornas utgångsdatum på burken.
3. Kontrollera batterisymbolen  på skärmen. (Se sidan 54, Batteriets status.)



Symboler som används

Följande symboler används i produktmärkningen för CONTOUR®NEXT LINK 2.4-systemet för blodsockerkontroll (mätarens förpackning och märkning samt reagensens (teststickornas) och kontrollösningens förpackningar och märkning).

Symbol	Vad symbolen betyder	Symbol	Vad symbolen betyder
	Används före (sista dagen i månaden)		Antal teststickor som ingår
	Lotnummer (Satsnummer)		Kontrollområde (Normalt)
	Datum för kassering av kontrollösning		Kontrollområde (Lågt)
	Temperaturbegränsningar		Kontrollområde (Högt)
	Läs bruksanvisningen		Får inte återanvändas
	Medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik		Steriliserad med bestrålning
	Listnummer		Skaka 15 gånger
	Tillverkare		Viktigt

Symbol	Vad symbolen betyder
	Batterierna måste kasseras i enlighet med de lagar som gäller i ditt land. Kontakta närmaste behörig myndighet för information om vad som gäller för kassering och återvinning i området där du bor. Mätaren ska behandlas som kontaminerat avfall och kasseras enligt lokala säkerhetsregler. Den får inte kasseras tillsammans med elektroniskt avfall.
	USB-kabeln ska kasseras som elektriskt och elektroniskt avfall. Får inte kastas som hushållsavfall. Kom ihåg att följa de lokala föreskrifterna.

Kontakta sjukvårdspersonal eller närmaste avfallscentral för riktlinjer angående kassering av medicinska preparat.

Systemspecifikationer

Blodprov: Kapillärt helblod

Testresultat: Omvandlat till plasmaglukos/serumglukos

Provvolym: 0,6 µl

Mätområde: 1,1 mmol/L till 33,3 mmol/L

Nedräkningstid: 5 sekunder

Minne: Lagrar de senaste 1 000 testresultaten

Typ av batteri: Underhållsfritt, 250 mAh uppladdningsbart litium-polymerbatteri, 3,4v – 4,2v (5 V ingångsspänning)

Mätarens/batteriets livslängd: 5 år

Laddningsström: 300 mA

Temperaturområde för stickornas förvaring:

Temperaturområde för kontrollösningens förvaring:

Drifttemperaturområde:

Kontrollösningens drifttemperaturområde:

Mätarens luftfuktighetsområde vid drift: 10 %–93 % relativ luftfuktighet

Luftfuktighet: 10–93 % relativ luftfuktighet

Mått: 97 mm bred x 31 mm hög x 18 mm djup
(3,8 tum bred x 1,2 tum hög x 0,7 tum djup)

Vikt: 43 gram

Ljudeffekt: 45 till 80 dBA på ett avstånd av 10 cm (3,9 tum)

Radiosändarens frekvens: 2,4 GHz–2,4835 GHz

Maximal radiosändarstyrka: 0 dBm

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätaren uppfyller de elektromagnetiska kraven enligt ISO 15197:2013. Den elektromagnetiska strålningen är låg och orsakar sannolikt inga störningar av annan elektronisk utrustning i närheten. Det är inte heller sannolikt att strålning från elektronisk utrustning i närheten kommer att orsaka störningar av CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren. CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren uppfyller kraven enligt IEC 61000-4-2 avseende immunitet mot elektrostatisk urladdning. Det är tillrådligt att undvika användning av elektroniska produkter i mycket torra miljöer, i synnerhet i närvaro av syntetiska material. CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren uppfyller kraven i IEC 61326-1 för radiofrekvensstörningar. För att undvika radiofrekvensstörningar ska du inte använda CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren i närheten av elektrisk eller elektronisk utrustning som ger upphov till elektromagnetisk strålning, eftersom de kan störa den korrekta driften hos mätaren.

Skötsel av mätaren

OBSERVERA: Undvik att utsätta mätaren och teststickorna för överdriven fuktighet, värme, kyla, damm eller smuts.

- Förvara mätaren i det medföljande fodralet när det är möjligt.
- **Tvätta händerna och torka dem väl före all hantering så att mätaren och teststickorna hålls fria från vatten, oljor och andra främmande ämnen.**
- Se till att blod, kontrollösning och rengöringsvätskor inte kommer in i stickporten eller USB-uttaget.
- Hantera mätaren varsamt så att du inte skadar elektroniken eller orsakar några funktionsfel.
- USB-locket till din CONTOUR®NEXT LINK 2.4-mätare är avsett att skydda USB-uttaget. Kontakta kundsupport för att få ett nytt lock om du tappat bort det. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.

Rengöring av mätaren

- CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätarens utsida kan rengöras med en fuktig (ej våt) luddfri trasa med ett mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel, t.ex. 1 del blekmedel utspätt med 9 delar vatten. Torka torrt med en luddfri trasa efter rengöringen. Stick inte in någonting i USB-porten eller stickportens öppning och försök inte rengöra insidan av den.

VIKTIGT: Låt inte rengöringsmedlet rinna in i eller mellan knapparna, USB-locket eller stickportens öppning. Det kan orsaka funktionsfel.

Förrådsartiklar

Ha namnet på ersättningsvaran eller tillbehöret tillhanda när du ringer eller skriver.

Ersättningsdelar

Föremål

- CONTOUR NEXT LINK 2.4 bruksanvisning
- CONTOUR NEXT LINK 2.4 snabbguide
- USB-förlängningskabel
- USB-lock
- Väggladdare
- CONTOUR®NEXT teststickor
- CONTOUR®NEXT kontrollösning
- Blodprovstagare
- Lansetter
- Kontrollera webbplatsen **www.diabetes.ascensia.com** för uppdateringar till mätaren eller till GLUCOFACTS®DELUXE.
- Kontakta kundsupport för att beställa delar. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.

Referenser

1. Wickham NWR, et al. Unreliability of capillary blood glucose in peripheral vascular disease. *Practical Diabetes*. 1986;3(2):100.
2. Atkin SH, et al. Fingertstick glucose determination in shock. *Annals of Internal Medicine*. 1991;114(12):1020-1024.
3. Desachy A, et al. Accuracy of bedside glucometry in critically ill patients: influence of clinical characteristics and perfusion index. *Mayo Clinic Proceedings*. 2008;83(4):400-405.
4. US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>
6. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2014. *Diabetes Care*. 2014;37(supplement 1);S14.
7. Cryer PE, Davis SN. Hypoglycemia. In: Kasper D, et al, editors. *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 19th edition. New York, NY: McGraw Hill; 2015. <http://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1130§ionid=79753191>
8. Data on file, Ascensia Diabetes Care.
9. Burtis CA, Ashwood ER, editors. *Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*. 5th edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001;444.

Garanti

Tillverkarens garanti: Ascensia Diabetes Care garanterar den köpare som ursprungligen har köpt instrumentet att detta kommer att vara fritt från defekter i material och utförande under 5 år från och med datumet för det ursprungliga köpet (utom i nedanstående fall). Under den nämnda 5-årsperioden, åtar sig Ascensia Diabetes Care att kostnadsfritt ersätta en defekt enhet med en likvärdig modell eller med den aktuella versionen av ägarens modell.

Garantins begränsningar: Följande undantag och begränsningar gäller för garantin:

1. Förbrukningsdelar och/eller tillbehör är garanterade under endast 90 dagar.
2. Denna garanti omfattar endast ersättning beroende på fel på delar eller utförande. Ascensia Diabetes Care är inte skyldiga att ersätta några enheter som ej fungerar eller är skadade på grund av felanvändning, olyckor, ändringar, missbruk, försummelse, underhåll av annan än Ascensia Diabetes Care, eller oförmåga att använda instrument enligt instruktionerna. Dessutom, Ascensia Diabetes Care påtar sig heller inget ansvar för funktionsfel eller skada på Ascensia Diabetes Care instrument som uppstått på grund av användning av andra teststickor eller kontrollösningar än de tillämpliga produkterna som rekommenderas av Ascensia Diabetes Care (dvs. CONTOUR®NEXT teststickor och CONTOUR®NEXT kontrollösningar).
3. Ascensia Diabetes Care förbehåller sig rätten att göra ändringar av instrumentets utformning utan förpliktelse att införliva sådana ändringar i tidigare tillverkade instrument.
4. Ascensia Diabetes Care har ingen kännedom om prestandan hos CONTOUR®NEXT LINK 2.4 blodsockermätare om instrumentet används med andra teststickor än CONTOUR NEXT teststickor, och lämnar därför ingen garanti för prestandan hos CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren när denna används tillsammans med andra teststickor än CONTOUR NEXT teststickor eller om en CONTOUR NEXT teststicka förändras eller modifieras på något sätt.

5. Ascensia Diabetes Care lämnar ingen garanti för prestandan hos CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren eller testresultat när den används med annan kontrollösning än CONTOUR NEXT kontrollösning.
6. Ascensia Diabetes Care utfärdar ingen garanti för prestandan hos CONTOUR NEXT LINK 2.4 mätaren eller testresultaten vid användning av någon annan programvara än CONTOUR®DIABETES App (där stödd) eller GLUCOFACETS®DELUXE programvara för analys av blodsockerresultat (där stödd) från Ascensia Diabetes Care.

ASCENSIA DIABETES CARE LÄMNAR INGEN ANNAN UTTRYCKLIG ELLER ANTYDD GARANTI FÖR DENNA PRODUKT. ALTERNATIVET MED UTBYTE, VILKET BESKRIVS OVAN, ÄR ASCENSIA DIABETES CARES ENDA FÖRPLIKTELSE ENLIGT DENNA GARANTI.

ASCENSIA DIABETES CARE KAN INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ÄVEN OM ASCENSIA DIABETES CARE HAR MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

I vissa länder medges inte att oförutsedda skador eller följdskador utesluts eller begränsas, så ovanstående begränsningar gäller eventuellt inte i ditt fall. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan också omfattas av andra, landsspecifika rättigheter.

För service under garantin: Köparen måste kontakta Ascensia Diabetes Cares kundsupport för assistans och/eller instruktioner om hur man servar instrumentet. Kontaktuppgifter finns på bakre omslaget.

Index

Alternativ för pump	33	Trender	32
Autoanslutning	33	Hög och Låg varning	11
Manuell anslutning	38	Inställning	11
Alternativt testställe (AST)	18	Vid testning	22
Ansluta mätare och pump	33	Högt (eller lågt) blodsocker	22
Autoanslutning	33	Symtom	56
Manuell anslutning	38	Varningar	11
AutoLog/ Måltidsmarkering	10	Inställningar för skicka	10
Stänga av	48	Ändra inställning	10
Sätta på	47	Skicka testresultat till pumpen	25
Automatisk anslutning av mätare och pump	33	Inställningsmeny	33
Barnspärr	26	Alternativ för pump	33
Batteri	54	AutoLog	47
Avlägsnande	55	Datum	45
Laddning	55	Hög och Låg varning	51
Snabbladdning	55	Kundsupport	52
Statusdisplay	54	Ljud	47
Bloddroppe	15	Mål	49
Få fram för testning på fingertoppen	15	Påminnelser	43
Få fram för testning på alternativt testställe	18	Språk	52
Blodprovstagaren	13	Tid	45
Bolusdos från Inställningsmenyn	31	Trendintervall	51
Bolusdos från testresultat	25	Knappar	4
Förinställd bolus	27	Bläddra/ Välja	5
Manuell bolus	26	OK	5
CONTOUR®NEXT		Övre meny	4
Kontrollösning	23	Knappar för att Välja/Bläddra	5
Teststicka	3	Koppla bort pumpen från mätaren	43
Datum	45	Kundsupport	52
Format (dag.månad.år) eller (månad/dag/år)	10	Kontaktnummer	Bakre omslag
Inställningar: Ansluten till pump	46	Lampa vid stickporten	4
Inställning: Inte ansluten till pump	45	Ljud På/Av	47
Felmeddelanden	53	Loggbok/ Minne	31
Fjärrbolus av	31	Föra in poster (Noteringar)	30
Förinställd bolus	27	Granska	31
Garanti	64	Låga (och höga) blodsockerresultat	22
Grundinställningar	5	Länka mätare och pump	33
Huvudmeny	31	Manuell anslutning	38
Bolus	31	Manuell bolus	26
Inställningar	33	Material/ Reservdelar	63
Loggbok	31	Medelvärden/ Trender	32

Meny-knapp	4
mg/dL (milligram per deciliter)	iii
MiniMed insulinpump	4
Minne/ Loggbok	31
mmol/L (millimol per liter)	iii
Målintervall	12
Med AutoLog Av	49
Med AutoLog På	50
Måltidsmarkörer (AutoLog)	10
Mätare	4
Kassering	55
Översikt	4
Noggrannhet	56
Noteringar	30
Lägga till ett testresultat	30
Ta bort en notering	30
Provvolum	61
Precision	57
Pumpanslutning	33
Autoanslutning	33
Koppla ifrån/ Radera	43
Manuell anslutning	38
Visa anslutning	43
På/Av: Mätare	4
Påminnelser	28
Ställa in efter ett test	28
Ställa in från inställningsmenyn	43
Stänga av	44
Provtagning	13
Rengöring av mätaren	62
Serviceinformation	59
Skötsel av mätaren	62
Språk	6
Stickor	3
Underfylld sticka	16
Symboler som används	60
Symtom på lågt (eller högt) blodsocker	56
Synkronisera tid och datum	45
Systemspecifikationer	61

Sätta på/stänga av mätaren	4
Teknisk information	56
Test med kontrollösning	23
Teststickor	3
Testning	13
Alternativt testställe (AST)	18
Testning av blodsocker	13
Testning i fingertopp	15
Testning i mörker	22
Testning med AutoLog Av	16
Testning med AutoLog På	17
Testning i fingertopp	15
Tid	45
Format (12- eller 24-timmarsklocka)	46
Inställning: Ansluten till pump	46
Inställning: Inte ansluten till pump	45
Tillsätta mer blod	16
Trender (Medelvärden/Sammanfattningar)	32
Visa Trender med AutoLog Av	32
Visa Trender med AutoLog På	32
Trendintervall: Inställningar	51
Trådlös, slå På/Av	42
USB-förlängningskabel	iv
Underfylld sticka	16
Varningar	11
Batteri	54
Högt/lågt blodsocker	22
Webbplats	Bakre omslag
Ändra mål	50
Ändra varningar	11



Distribueras i Sverige av:
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr
111 21 Stockholm
Sverige
Tel: 020-83 00 84
www.diabetes.ascensia.se

Ascensia Diabetes Care kundsupport finns tillgänglig vardagar, under kontorstid.
020-83 00 84
www.diabetes.ascensia.se



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts och No Coding (Ingen Kodning)-logotypen är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alla andra varumärken är respektive ägares egendom.

Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed och Paradigm är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic MiniMed, Inc.

Medtronic

För information om patent och relaterade licenser, se:
www.patents.ascensia.com

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.



85701347

Rev. 03/17